

# 医疗设备维修 驰马SMC-I型C臂维修 C型臂维保

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 医疗设备维修 驰马SMC-I型C臂维修 C型臂维保     |
| 公司名称 | 四川仁安医疗设备维修有限公司                |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 四川省成都市锦江区经天一街37号5栋1层17号（注册地址） |
| 联系电话 | 15215095802                   |

## 产品详情

### [C臂的日常使用与保养](#)

- 1.松开脚刹车，将机器推至手术床，调节手术床。显示器放于面对术者便于观看的位置。
- 2.连接操作机和显示器的高压电缆，接通电源。3.打开操作机控制面板上的电源开关，自检。4.松开C臂上的制动开关，调节C型臂使球管和接收器对准拍摄部位，然后锁定制动开关。
- 5.在操作机控制面板上选择透视或拍片功能，选择手动程序或自动程序调节能量大小。
- 6.工作人员穿戴防护用具，做好防护准备，选择手控开关或脚踏控开关进行放电拍片。
- 7.如需打印图片，先在显示屏幕上选出所需打印的图片，轻按打印开关即可。8.操作完毕，关闭控制面板上的电源开关，拔下电源插座，整理线路。9.将操作机退出视野，分离操作机和显示器的高压电缆。将设备放回原处，锁定所有的制动开关。

### 日常保养

- 1.定期对C形臂进行检修，保证使用。
- 2.移动C形臂机时宜小心，勿碰撞。

3.每次使用后须将C形臂机支持杆降至Zui低位。

4.C形臂使用完毕后推回原位并锁定轮脚。