

# 兽用非接触红外线测温仪 冷藏箱 动物解剖台

产品名称	兽用非接触红外线测温仪 冷藏箱 动物解剖台
公司名称	泰州澳华医疗器械制造有限公司
价格	1.00/套
规格参数	用途:动物测温 电源电压:3 ( V ) 工作温度:0.0-50.0 ( )
公司地址	泰兴市泰兴镇党校路55号
联系电话	13905269144 13905266144

## 产品详情

用途	动物测温	电源电压	3 ( V )
工作温度	0.0-50.0 ( )	品牌	澳华
型号	AH-CW		

该产品是一款专业测量养殖场动物（猪、牛、羊、禽等）温度的非接触式红外线体温计,根据个体皮肤的差异,测量的温度会有所不同,当室温变化很大时,应把红外线测温仪置于室温15至20分钟后再使用。该产品不带激光点，避免对动物皮肤造成伤害。

### 1.安全手则

|请在使用前仔细阅读本说明书请在10到40度的环境温度下使用该产品

|请不要把该产品靠近带电的物体,以免电击

|请不要在相对湿度大于85%的环境下使用该产品

|需要清洁时,请用酒精轻拭仪表表面

|一旦产品出现问题请联系分销商,不要试图自行修理

### 2.产品特色：

|非接触式高精度测量

|可选择 ° c或 ° f

I可设置高温报警值

I可记忆储存最新的32个测数据值

I大屏幕液晶显示，任何光线都可以清晰显示

I自动数据保持及自动关机

I自动选择量程,分辨率为 $0.1^{\circ}\text{C}$ ( $0.1^{\circ}\text{F}$ )

I带背光的Icd显示

3.技术参数：1.正常使用条件：环境温度：10 ~40 相对湿度: 85%

2.电源：dc9v ( 6f22层叠电池一块 ) 3.显示精度：0.1

4.温度测量范围:  $32.0 \sim 45$  5.测量精度：温度范围： $32 \sim 35.9$  ;  $93.2 \sim 96.6$  +/-0.3 ( 0.5 )  
温度范围： $36 \sim 39$  ;  $96.8 \sim 102.2$  +/-0.2 ( 0.4 ) 温度范围： $39 \sim 45$  ;  $102.2 \sim 113$  +/-  
-0.3 ( 0.5 ) 6.响应时间： 0.5秒