

一次性病毒采样管

产品名称	一次性病毒采样管
公司名称	三明市贝真生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	三明市三元区荆东路85号
联系电话	86-0598-5108518 18950952881

产品详情

【包装规格】50人份/盒、100人份/盒。

【预期用途】用于临床检验分析前样本的收集、运输和储存。

【保存原理】病毒是一种个体微小，结构简单，只含一种核酸（DNA或RNA），必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞型生物，病毒没有自己的代谢机构，没有酶系统。因此病毒离开了宿主细胞，就成了没有任何生命活动、也不能独立自我繁殖的化学物质。它的复制、转录、和转译的能力都是在宿主细胞中进行，当它进入宿主细胞后，它就可以利用细胞中的物质和能量完成生命活动，按照它自己的核酸所包含的遗传信息产生和它一样的新一代病毒。一次性使用病毒采样管提供部分的物质和能量，有效保存病毒或病毒基因片段，便于样本的运输和病毒的分离培养与鉴定。

【主要组成成份】

一次性使用病毒采样管由含一定量保存液的管单独组成，或跟一定数量的拭子组合而成。为非无菌提供。

对应的型号组份所包含如下表中内容物：

项目	代号	不含	包含											
指示剂	Z	0	1											
灭活剂	M													
装液量	Y		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
拭子数量	S	00	01	支										

【贮存条件】常温保存。

【有效期】24个月。

【样本要求】

- 1、采集样本的时间应在病程初期或急性期，此时样本内含病毒量多。
- 2、根据感染的部位及病程采集不同种类的样本。如眼拭子、鼻拭子、咽拭子、咽漱液、深咳痰液、粪便、直肠拭子、尿液、尿道拭子、阴道拭子、疱疹液、组织活检样本等。

【一次性使用病毒采样管使用方法】

- 1、打开包装，取出拭子。
- 2、根据不同的实验目的，用拭子在相应的部位采样。（如果是液体样本，用吸管等吸取；如果是组织活检样本，用镊子摄取。）
- 3、采样后将拭子（或液体样本、或组织活检样本）送入一次性使用病毒采样管中，并将多余的拭子柄折断弃之，旋紧杯或管盖。
- 4、在标签上注明样本信息，及时送检。

【一次性使用病毒采样管的局限性】

- 1、一次性使用病毒采样管只能延长病毒存活时间，或保存病毒基因片段，便于样本的运输和病毒的分离培养与鉴定。
- 2、保存病毒或病毒基因片段，易受取样的影响。

【注意事项】

- 1、本产品仅为体外保存病毒或病毒基因片段使用，不作诊断用。
- 2、受污染的拭子不能使用。
- 3、已经采集样本的一次性使用病毒采样管，废弃时应进行灭活处理，并按医疗废物处理。
- 4、发现一次性使用病毒采样管过期、变色、浑浊、漏液等现象禁止使用。