

电子身高体重测量仪 体检测量身高体重的仪器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 电子身高体重测量仪 体检测量身高体重的仪器 |
| 公司名称 | 河南乐佳电子科技有限公司 |
| 价格 | 16800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:乐佳电子 型号:HW-900Y 测量项目:身高体重BMI检测 |
| 公司地址 | 郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209 |
| 联系电话 | 86-182-03652601 18203652601 |

产品详情

电子身高体重测量仪 体检测量身高体重的仪器

一、简介：

身高体重测量仪本仪器是为测量身高、体重设计制造的,它以可靠的硬件设计和科学的软件技术相结合,采用美国进口超声波探头和高精密压力传感器,实现身高和体重的自动测量。同时计算BMI身体质量指示,指示体型(偏瘦、正常、偏

胖、肥胖)、测量结果既可以显示和打印出来,又能与计算机通讯联网,把数据传给计算机,以实现进一步的处理,还特别设计了语音报告检测结果的功能.可广泛适用于卫生院健康驿站、学校、体检中心、社区卫生服务中心、健身

中心、疗养院、高等院校等场合的身高,体重测量。

二、主要特点：

- 1.全自动测量.超声波技术测量身高(无触碰式),精密传感器测量体重。
- 2.仪器功能丰富,操作简单,人性化设计,测量准确快速,灵敏度高。
- 3.检测数据数码(LED)显示,直观清晰。

4.语言自动报告检测结果。

5.串行数据传输功能(RS232),使与之相连的计算机能够随时掌握测量情况,数据处理方便。

6.特别设计的校准程序使仪器校准操作十分容易。

7.高速热敏打印机,电脑自动计算身高体重指数(BMI)。

三、常见问答：

问：身高体重测量仪常见处理故障及原因有哪些？

答：身高体重测量仪可以自动测出身高体重，测量结果高清晰打印，自动切纸，优美语音播报。测量数据可以通过有线和无线数据传输。使你坐在办公桌前，一切问题轻松搞定。那么身高体重测量仪常见测量故障及原因有哪些。

1、每次测量身高不一样。

由于全自动身高体重秤的测高方式为全自动测量，在身高的测量方式上采用了压杆式测量的机型对于测量误差会更小，由于超声波测量仪对于测高的原理是基于超声波测距的理论，所以全自动超声波身高体重秤测高的过程会因每次站的位置和人体直立的前倾或者后仰而出现些许偏差。

2、打印结果不清楚

带打印机型的测量结果打印之后打印纸自动切断之后显示结果不清，或者结果挤压在一起难以辨认。我公司打印机型全自动身高体重秤标配打印机均为爱普生微型打印机，打印纸质采用热敏纸，不存在因为色带的原因产生的打印结果不明显或者打印残缺等现象。

3、插电之后不显示

在插上电源之后身高体重秤无显示。请检查电源，如电源无问题，打开测量仪显示器的前盖板，在主芯板下方部位有电源保险丝，查看保险丝是否烧断，更换保险丝，如保险丝没问题，请更换电源重试。

电子身高体重测量仪 体检测量身高体重的仪器，全自动身高体重自动测量仪，体检专用型身高体重体检一体机适用于体检机构、卫生院、社区服务站等。