

一次性病毒采样管生产厂家一次性采样管

产品名称	一次性病毒采样管生产厂家一次性采样管
公司名称	温州欧斯达康生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧斯达康 型号:A型灭活 规格:10ml[50份/盒]
公司地址	温州市瓯海东方路38号(大学科技园孵化器1号楼1208室)
联系电话	13868129154

产品详情

一次性使用病毒采样管灭活型说明书

【产品名称】

通用名称：一次性使用病毒采样管 型号：A型

英文名称：Disposable virus sampling tube

【包装规格】50人份/盒 &800人份/箱

【预期用途】

用于临床流感、禽流感、手足口病、麻疹等病毒标本以及衣原体、支原体、脲原体标本的采集与运送。

【主要组成成份】

序号

组成

50人份/盒

800人份/箱

10ML保存管1支（含3ml灭活保存液）

3ml × 50管

3ml × 800管

2

鼻拭子或咽拭子

50支/盒

800支/箱

3

说明书

1份

【储存条件及有效期】 常温0~40℃，有效期12个月。

【样本要求】

1.适用样本类型：鼻咽拭子、唾液、痰液等临床样本；

2.样本的保存和运输：样本采集后应在48小时内运送进相应实验室检测，保存温度为2~8℃；如未能48小时内运送至实验室，应于-20℃或以下保存，于一周内送至相应实验室。样本应避免反复冻融。

【使用方法】

1.在采样管上标注相关样品信息。

2.根据不同的采样要求，用采样拭子在相应的部位采样，握住手柄轻轻将采样拭子插入取样部位，轻轻旋转取样拭子3-5圈，然后慢慢取出。

3.将提取出的样本放入采样管内，在管沿口拭子折断点将拭子折断，将刷头留在管中，随即旋紧管盖，密封起来即完成采样。

4.新鲜采集的临床标本应在48小时内运送至实验室，未能48小时送至实验室的，应置于-20℃或以下保存，标本送至实验室后应尽快分离，48小时内能接种分离的可置于4℃保存。如未能接种的应置于-20℃或以下保存。

5.常规采样方法有以下几种：

a)鼻拭子：将拭子头轻轻插入鼻道内鼻腭处，停留片刻后缓慢转动退出。以另一拭子拭另侧鼻孔，将拭子头浸入样液中，尾部弃去。

b)咽拭子：用拭子擦拭双侧咽扁桃体及咽后壁，同样将拭子头浸入采样液中，尾部弃去。

c)漱口液：用10mL生理盐水漱口，漱时让患者头部微后仰，发“噢”声，让生理盐水在咽部转动，用50

mL空样管收集洗液。

d) 鼻洗液：患者取坐姿，头微后仰，用移液管将50mL生理盐水注入一侧鼻孔，嘱患者同时发K音，以关闭咽腔。然后让患者低头使生理盐水流出，用50mL空采样管收集洗液，重复此过程洗两侧鼻孔。

e) 鼻咽抽取物：气管和支气管分泌物常采用此方法集，用与负压泵相连的收集器从鼻咽部抽取粘液。先将收集器头部插入鼻腔，接通负压，旋转收集器头部并缓慢推出。收集抽取黏液，并用集液5mL涮洗收集器三次。

【注意事项】

- 1.一次性使用采样器采样后应于2-8℃低温运输立即送检。采集的样本可置2-8℃短期放置48小时；长期保存应放置-20℃以下的低温条件，避免反复冻融。
- 2.该产品严禁用于细菌样本的采样，保存液本身所含抗生素对细菌有抑制作用。
- 3.禁止直接接触被采集患者，禁止润湿拭子后对患者来样。
- 4.采集样本时应严格按照采样程序进行，做到采样部位准确，采样力度均一适合，否则会影响样本质量。
- 5.产品过有效期或产品包装破损不得使用。

【有效期】12个月

【生产企业】温州欧斯达康生物科技有限公司

【产品备案凭证号】浙温械备20200060号

【生产备案凭证号】浙温食药监械生产备20200041号

注册地址：浙江省温州市东方路38号（大学科技园孵化器1号楼1208室）

生产地址：浙江省温州市东方路38号（大学科技园孵化器1号楼1208室）