

# 隔物灸定制加工 热疗贴加工 厂家现货直销

产品名称	隔物灸定制加工 热疗贴加工 厂家现货直销
公司名称	山东日照海旭医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海旭 规格:可定制 产地:菏泽单县
公司地址	济南市市中区万达广场c座505
联系电话	15169078610

## 产品详情

隔物灸是直接贴在穴位上面，隔物灸通过对穴位的持续温灸，疏通痹阻的经络气血，振奋低下或者衰退的功能。可以平衡失调的阴阳，使人体消除病痛，祛风散寒、消炎止痛、舒经活络、活血利窍、恢复健康，延缓衰老的作用。使用方法：1：贴膏药时，将膏药上的一层塑料薄膜揭下，用火轻轻一烤（电热吹风也可以），对准患处部位（如颈椎、腰椎，股骨头，膝关节、肩关节等以及疼痛部位）贴敷。为防止布边起皱，可用胶布条周边固定。2：膏药贴敷期间，个别患者短时间内会有胀痛感或酸困感加重现象，这是打通血脉时内压痹阻的现象所导致。一般3-5天之后症状即可缓解，因此如出现以上情况不必理会。3：膏药贴敷4-5天，个别患者因出汗或运动等各种原因导致膏药松动（包括洗澡需要揭去膏药的患者），可将其揭下后在火上轻轻一烤再贴敷在患病部位。隔物灸 二类器械文号A、规格：9cm × 11cm × 1贴/袋 × 5袋/盒 × 80盒/件B、注册证号：鲁械注准 20152260689C、隔物灸适应症：骨质增生、颈椎病、风湿、类风湿性关节炎、颈腰椎疼痛、肌肉酸胀、腰肌劳损、肩周炎、痛经、软组织挫伤疼痛。功能减退、免疫力下降的慢性疾病：慢性肠胃炎、性功能减退、慢性前列腺炎、附件炎、耳鸣、高血压、体虚易感冒、蝴蝶斑、口腔顽固性溃疡。D、用法：打开包装袋，取出隔物灸后撕去两边胶贴保护纸，将隔物灸贴在人体相关穴位上即可。对胶贴过敏者，可将隔物灸正面对准穴位，反贴在紧身衣上即可

隔物灸的使用方法：

1、使用前清洁贴敷部位皮肤,沿缺口处撕开密封包装袋,取出热疗贴,揭取粘胶离形纸,将胶面贴于患处或相关穴位,将两翼贴于皮肤固定。每24小时更换一次,十盒为一疗程。

2、揭开温控贴,贴在“方法一”中揭离的粘胶离形纸上待用,三十分钟发热贴温度升至合理温度时(因个体差异,皮肤感觉为准),用温控贴盖住发热包13进气孔为准,发热包温度会略有下降,可得到有效的控制。3、使用时撕开铝箔袋,取出热疗贴,展开护翼并撕下内侧离型纸。将热疗贴的内测中心部分对准疼痛部位或相关穴位,将护翼贴于皮肤。每日一贴,每帖8小时,6天为一疗程;寒湿类病症推荐使用2-3个疗程;骨伤类病症推荐使用3-4个疗程。可根据具体病症在热疗贴与相关穴位间放入姜片、蒜、附子等形成隔姜灸、隔蒜灸、附子灸等。

