

# 一次性理疗电极片

产品名称	一次性理疗电极片
公司名称	河南东璧医疗设备有限公司
价格	18.89/包
规格参数	品牌:河南东璧医疗设备有限公司 规格:6X9 产地:郑州市
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路相济路
联系电话	15093213211 15093213211

## 产品详情

【产品名称】理疗电极片

【结构组成】由导电水凝胶浆层和其他辅助层组成，不含药物成分。

【使用方法】

1. 使用前请清洁皮肤表面，除去表面污垢、汗渍和粉尘。
2. 将电极片与治疗仪导线正确连接，揭去电极片保护膜，粘贴于治疗部位，即可开机进行常规治疗。
3. 每次治疗结束后，请先关机再拨下导线插头、揭下电极片、贴上保护膜、妥善保存，以备下次再用。
4. 电极片一般使用寿命为10—20次。（产品的使用寿命与皮肤特性和使用方法有关）
5. 请密封放置在阴凉处保存。

【注意事项】

1. 使用前或使用中如有问题，建议向医生咨询。
2. 请勿用酒精清洁皮肤，酒精清洁后会给皮肤造成较大阻抗，影响效果。
3. 除非要立即使用，否则请勿拆开包装。
4. 电极片为单个病人专用，使用时无需清洁和消毒。

5. 电极片有脏污时应与皮肤紧密、均匀接触。
6. 治疗中电极应避免接触伤口及疤痕。
7. 出现皮肤过敏、刺激现象，应及时停止使用。

**【禁忌症】**

皮肤有炎症或溃烂的患者禁止使用。心脏内放有金属支架的患者禁止使用乳腺电极片。

**【维护保养】**

尽量不要让贴片接触到含有油脂的东西，也不要水洗，这样都会降低贴片的粘性。使用完后要将保护纸贴会，然后放到电极片的密封袋里封装，储存于阴凉干燥处。

**【储存环境】**

该产品应储存于阴凉干燥处。

**【生产日期】**

见外包装盒。