

## 下肢牵引带-腿部皮牵引使用示意图

产品名称	下肢牵引带-腿部皮牵引使用示意图
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:大中小 材质:复合布、尼龙、帆布 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

## 产品详情

### 下肢牵引带

【材质】：帆布、复合布、尼龙布

【适用范围】：股骨、胫腓骨、腿部肌肉损伤、神经压迫及骨折患者的牵引治疗。

【产品构成】：产品采用帆布或尼龙布、高质海绵、粘扣等材料，精细加工而成，具有使用简单、美观耐用等特点。由于尼龙布或帆布和腿部接触面积大，使用时更加舒适。

【产品型号】：大、中、小

【产品描述】：手工制作，光洁平整，强韧耐用，搭配美观

【注意事项】：1.使用前检查各部位是否牢固；

2.固在腿部固定时务必将粘扣（魔术贴）粘牢，牵引牢靠，以免给患者造成二次伤害，增加痛苦；

3.固定时间根据本人的需要，具体请遵医嘱。

【储存方法】：注意保持清洁，避免磨损。

??????

皮牵引是使用胶布或皮套等包裹患侧肢体进行牵引，进而维持骨折的复位和稳定。主要用于12岁以下儿童，老年人的稳定的粗隆间骨折或手术前后的辅助固定治疗等。

牵引重量不超过5公斤，随时观察血运神经症状改变。

一般维持3-4周。

其牵引力通过皮肤、筋膜、肌肉,间接达于骨或关节。

皮肤有创伤、炎症、溃疡、粘膏过敏以及静脉曲张等疾病者,不宜使用。

皮牵引操作前,应将局部皮肤洗净、剃除毛发。