

公卫体检车、基层移动医疗服务车、公卫体检车中标模式

产品名称	公卫体检车、基层移动医疗服务车、公卫体检车中标模式
公司名称	山东诺安诺泰信息系统有限公司
价格	88.00/辆
规格参数	
公司地址	济南市高新区颖秀路2766号科研生产楼1-101二层北201室
联系电话	0531-5569 6086 18553158035

产品详情

(公卫体检车)是智慧医疗体检车的一种,专门为《国家基本公共卫生服务规范》研发的便携式设备,将公卫体检项目、血糖仪、血压计、尿液分析仪、整合在车内实现一体化整合的临床检测设备,并支持将采集到的健康数据上传至个人健康档案。可开展居民电子健康档案建立、儿童健康管理、老年人健康管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、高血压与糖尿病健康管理、结核病健康管理、中医体质辨识管理等十几项国家基本公共卫生管理服务。

查体前的现场准备

- 1、提前一天检查维护所有查体设备和相应耗材数量是不是正常或者匹配。提醒提醒：查体年龄限制为65周岁以上及体检前注意事项
- 2、布置现场：结合现场情况，提前准备安排各个设备摆放位置及配套器具到位
- 3、搬运设备并连接
 - (1) 根据医院人员安排情况分放仪器设备（注：对设备轻拿轻放）
 - (2) 将设备连接电路
 - (3) 设备连电后检查设备是否运行正常
- 4、从村内检查身份证，是否查体标准
 - (1) 查体年龄限制为65周岁以上
 - (2) 如今年在卫生院做过检查的不需体检

（二）查体作业流程

- 1、刷身份证并贴码（注：贴真空采血管时不要挡住刻度，贴尿杯时确认条形码的位置能被扫上，如当年做过检查的不再体检）
- 2、身高体重（注：扫码完后在听到设备提示声音后再进行测量）
- 3、血压（注：扫码后再进行测量）
- 4、抽血（注：注意抽血的容量，生化管5毫升，血球管1毫升）
- 5、心电图（注：出图之后按“F1”确认，每天的日期是否正确）
- 6、B超
- 7、尿检（注：尿液不被过往人员碰出）

（三）血液送检及区域化验流程

- 1、将生化管进行现场离心，并与血球管一放入冷藏箱；
- 2、由专业公司到现场提取，并由冷链物流至指定的检验中心；
- 3、体检开始后，每日根据实际情况提取样本1-2次，以保证当日体检的全部样本配送至检验中心；
- 3、待化验室数据生成后，与工作站数据进行整合，并对全部数据进行复核；

（四）数据复核、数据上传及报告打印

- 1、由卫生院相关人员进行数据复核，复核完毕后进行数据上传；
- 2、打印存档报告用于存档，反馈报告由村医交给居民。