

凝胶理疗电极片

产品名称	凝胶理疗电极片
公司名称	河南东璧医疗设备有限公司
价格	18.89/包
规格参数	品牌:河南东璧医疗设备有限公司 规格:5X5 产地:郑州市
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路相济路
联系电话	15093213211 15093213211

产品详情

用于低频电疗的理疗电极片,其特征在于:其为分层结构,包括从上到下的依次设置的低频电流接入端、导电层、绝缘无纺布、碳纤维布、超导电层、水凝胶,其中绝缘无纺布、碳纤维布、超导电层中部均设置有小孔,低频电流接入端与导电层固定连接后,穿过所述小孔通过水凝胶粘合在一起,所述水凝胶与人体皮肤直接接触,所述超导电层面积小于绝缘无纺布、碳纤维布。本发明的理疗电极片,患者在电极片周围的皮肤没有灼伤、刺痛等不良感觉,患者使用舒服、方便。

一种用于低频电疗的理疗电极片,其特征在于:其为分层结构,包括从上到下的依次设置的低频电流接入端、导电层、绝缘无纺布、碳纤维布、超导电层、水凝胶,其中绝缘无纺布、碳纤维布、超导电层中部均设置有小孔,低频电流接入端与导电层固定连接后,穿过所述小孔通过水凝胶粘合在一起,所述水凝胶与人体皮肤直接接触,所述超导电层面积小于绝缘无纺布、碳纤维布。

注意事项

1. 使用前或使用中如有问题,建议向医生咨询。
2. 请勿用酒精清洁皮肤,酒精清洁后会给皮肤造成较大阻抗,影响效果。
3. 除非要立即使用,否则请勿拆开包装。
4. 电极片为单个病人专用,使用时无需清洁和消毒。
5. 电极片有脏污时应与皮肤紧密、均匀接触。
6. 治疗中电极应避免接触伤口及疤痕。
7. 出现皮肤过敏、刺激现象,应及时停止使用。

适用症状

颈椎病，腰间盘突出，腰肌劳损，滑膜炎，骨刺，骨质增生，坐骨神经痛，关节炎，风湿，肩周炎等。