

圆形理疗用体表电极

产品名称	圆形理疗用体表电极
公司名称	河南东璧医疗设备有限公司
价格	18.89/包
规格参数	品牌:河南东璧医疗设备有限公司 规格:3CM 产地:郑州市
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路相济路
联系电话	15093213211 15093213211

产品详情

理疗电极片使用方法：

- 1、外用，使用前洗净患处擦干。
- 2、撕开铝箔袋，将理疗电极片分别镶嵌在正负电极板上；理疗电极片紧贴在皮肤相关部位，用绷带（或敷贴，沙袋等）将电极板固定，压紧。
- 3、理疗结束，切断电源后，松开电极板，取出理疗电极片，用清水或生理盐水清洗与理疗极片接触的皮肤相关部位。

理疗电极片注意事项：

- 1、理疗电极片必须与皮肤完全紧密接触
- 2、使用前先清洁皮肤，使用时有清凉感，此时必须注意理疗仪器的输出强度，微感有电刺激即可
- 3、使用时如感到刺激太强，如皮肤出现强烈刺痛或灼热感，必须减小理疗仪器的强度或温度
- 4、理疗电极片包装破损，电极片变干时，不宜使用，以免造成灼伤
- 5、本品为一次性使用产品，不能重复使用，以免造成因为电极片电阻等理化性质改变，造成灼伤或交叉感染
- 6、本产品配合理疗仪器使用，使用时间不能超过一小时
- 7、皮肤破损或局部疮疡处禁用

适用科室：

康复科：关节炎、颈椎病、腰肌劳损、坐骨神经痛、落枕、软组织扭挫伤、肌肉酸疼、消肿止痛