

# 尾巴式理疗电极片

产品名称	尾巴式理疗电极片
公司名称	河南东璧医疗设备有限公司
价格	18.89/包
规格参数	品牌:河南东璧医疗设备有限公司 规格:8X8 产地:郑州市
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路相济路
联系电话	15093213211 15093213211

## 产品详情

### 优势

- 1: 定时, 定量, 定速给药, 病变局部形成药物高溶浓度区, 促进药物向细胞内转运, 提高疗效
- 2.透药速度快, 比自然渗透高百倍
- 3.适应范围广, 多科室使用
- 4.提高药物利用率, 减少用药总量, 避免毒副作用

### 使用方法:

- 1、外用, 使用前洗净患处擦干。
- 2.撕掉凝胶片凸面防护纸时如止水圈同时撕破, 应予更换;
- 3.凝胶片凸面与治疗探头连接时压紧凸面金属膜与探头四周以免漏气;
- 4.治疗参数为事先设定, 一般无特殊情况无需调节;
- 5.适用水剂、油剂、乳剂、水凝胶剂、混悬剂不适用固体凝胶剂、霜剂、硬膏剂、中药散剂;
- 6.治疗过程中5分钟电极倒转一次短鸣声属正常如长时间鸣叫请检查机器;
- 7.药物导入结束后, 至少保留贴片40分钟-60分钟;

### 注意事项:

- 1、理疗电极片必须与皮肤完全紧密接触
- 2、使用前先清洁皮肤，使用时有清凉感，此时必须注意理疗仪器的输出强度，微感有电刺激即可
- 3、使用时如感到刺激太强，如皮肤出现强烈刺痛或灼热感，必须减小理疗仪器的强度或温度
- 4、理疗电极片包装破损，电极片变干时，不宜使用，以免造成灼伤
- 5、本品为一次性使用产品，不能重复使用，以免造成因为电极片电阻等理化性质改变，造成灼伤或交叉感染
- 6、本产品配合理疗仪器使用，使用时间不能超过一小时
- 7、皮肤破损或局部疮疡处禁用

适用科室：

康复科：关节炎、颈椎病、腰肌劳损、坐骨神经痛、落枕、软组织扭挫伤、肌肉酸疼、消肿止痛