

女性气管切开吸痰与护理培训模型

产品名称	女性气管切开吸痰与护理培训模型
公司名称	上海知能医学模型设备制造有限公司
价格	25000.00/套
规格参数	品牌:医博 型号:BIX/2700 生产厂家:知能医学模型
公司地址	松江区昆港公路1268号
联系电话	021-63818866 18116401121

产品详情

知能医学模型 女性气管切开吸痰及护理模型

知能医学模型供应的这款女性气管切开吸痰及护理模型

是集气管切开吸痰及鼻腔吸痰与护理于一体的专用护理人，身高170cm，双眼可眨动，关节灵活，可实现多种体位，满足操作需要。解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，胸部富有弹性，外皮可打开，能观察到真实大小的肋骨。功能特点：

首先对气管与支气管交叉处注入20-30毫升痰液（液5:2水）（可洗洁精兑水代替痰液）。操作前连接吸痰管及湿润吸痰管，首先吸气管切开处，然后经气管切开处进行吸痰管插入，吸痰管插入深度为10-20CM。吸痰时左右旋转，向外退出，吸净痰液，吸口鼻处。

每次吸痰时间在15秒内完成，间歇3-5分钟可重复。临床护理技能：床上擦浴及更衣。

扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法。

轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。瞳孔观察示教：散大的瞳孔，正常的瞳孔。

外耳道的冲洗。经鼻腔插入吸引管技术练习；可练习吸痰训练。

吸引管和YanKen管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰，清除患者呼吸道分泌物，保持呼吸道通畅。

吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引；模拟痰液通过鼻胃管经鼻腔插入到气管内，通过注射器注入20-30毫升（模拟痰液可以洗洁精代替液5：水2）。肌内注射：

左右上臂、臀部、股外侧部有肌肉注射块，左臂有可旋转的肌内注射环；可注入真实药液；

肌肉注射块可取下清洗，更换方便； 右手臂静脉注射：

正确穿刺时落空感明显并有回血产生；同一部位可经受上百次反复穿刺且不渗漏；

静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用；

造瘘口护理：结肠造瘘口、回肠造瘘口，进行冲洗练习。 男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗：

模型人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑； 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度（18-20cm）；

女性尿道充分体现短、粗、直，真实尺寸（3-5cm），具有尿道口、阴道口、阴蒂等；

导尿术成功后可导出模拟尿液；

褥疮护理：具有褥疮的两个临床分期：淤血红润期、溃疡期。相关产品推介：[高智能综合护理模拟人](#)

[成人护理及心肺复苏模拟人](#) [成人鼻腔吸痰及护理模型](#) [多功能新生儿急救护理模拟人](#)

[多功能婴儿护理模拟人](#)

友情

提示：如

果以上产品不符合

您的需求，销售经理还可以根据您的具体需求针对性推荐适合您的急救护理模拟人产品。