

如何牵引腰椎间盘突出症？腰椎键盘突出如何牵引？配合使用腰椎牵引带

产品名称	如何牵引腰椎间盘突出症？腰椎键盘突出如何牵引？配合使用腰椎牵引带
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

我公司主要经营四肢约束带，医用腹带，体位垫，膝关节矫形器，胸腰椎矫形器，医用固定带，颈托，外固定支具

安平县欧博康复器材有限公司位于河北省衡水市安平县，是一家专业研制、生产、销售一类医疗器械的企业，主要生产医用腰围、医用腹带、医用固定带、医用牵引带、医用外固定支具、体位垫（防褥疮垫）、医用骨折固定夹板、四肢约束带、肢体矫形器、自发热护具等产品，其各项指标均符合行业、企业标准规定的产品标准要求，经临床应用多年，深受用户好评。安平县欧博康复器材有限公司医疗产品工艺设备先进，完善的检验手段，严格生产的各个环节确保了产品质量合格。产品畅销全国各地医院及经销公司，得到广大用户的信赖和好评。我公司与时俱进，加强企业现代化管理，提高综合素质。以科技推动新产品的开发，不断适应市场的需求，坚持互惠互利的原则，共同开发市场。愿与你携手，精诚合作！

1. 腰椎牵引带简介：

主要用于腰椎骨折牵引，腰椎骨质增生牵引，腰椎盘突出症的牵引，此产品用软性材料制成，上面有魔术贴可以用来调节松紧。适合腰部全形，贴身，舒适，拉力均匀，避免皮肤损伤，可持重25-40公斤。

2. 产品规格：

大号长105厘米，中号长97厘米，小号长90厘米。

3. 使用方法：

- 1、将腰椎牵引带两片分开，分别系于两端床头上（可用绳索连接牵引带子）。
- 2、患者躺在床上，将两片牵引带分别系牢固定在腰部、胸部，身体应尽量向上挺伸，将牵引带拉紧（系于床头的带子长短须一致）另一头加重物来调牵引力的大小根据医生建议选择合适的力度。
- 3.每天睡前牵引一次,时间以20-30分钟为宜,牵后即平躺休息,患者也可根据自己需要灵活调整时间和次数.10天为1疗程,2-3个疗程可明显见效,希望患者能够坚持牵。

4. 腰椎牵引带注意事项：

- 1、固定胸围带时，身体应尽力向上挺伸，胸围牵引带拉紧，以免无效牵引行程过长而影响效果。
- 2、牵引力量应以能忍受为宜，勿过度牵引，造成不良后果。
- 3、牵引完毕后，应卧床休息30-60分钟，以保证牵引效果。
- 4、牵引后，颈部或腰部若有酸困不适，疼痛感觉，卧床休息后自行消除。