如何牵引腰椎间盘突出症?腰椎键盘突出如何牵引?配合使用腰椎牵引带

产品名称	如何牵引腰椎间盘突出症?腰椎键盘突出如何牵 引?配合使用腰椎牵引带
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号(注册地址)
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

我公司主要经营四肢约束带,医用腹带,体位垫,膝关节矫形器,胸腰椎矫形器,医用固定带,颈托, 外固定支具

安平县欧博康复器材有限公司位于河北省衡水市安平县,是一家专业研制、生产、销售一类医疗器械的企业,主要生产医用腰围、医用腹带、医用固定带、医用牵引带、医用外固定支具、体位垫(防褥疮垫)、医用骨折固定夹板、四肢约束带、肢体矫形器、自发热护具等产品,其各项指标均符合行业、企业标准规定的产品标准要求,经临床应用多年,深受用户好评。 安平县欧博康复器材有限公司医疗产品工艺设备先进,完善的检验手段,严格生产的各个环节确保了产品质量合格。产品畅销全国各地医院及经销公司,得到广大用户的信赖和好评。我公司与时俱进,加强企业现代化管理,提高综合素质。以科技推动新产品的开发,不断适应市场的需求,坚持互惠互利的原则,共同开发市场。愿与你携手,精诚合作!

1. 腰椎牵引带简介:

主要用于腰椎骨折牵引,腰椎骨质增生牵引,腰椎盘突出症的牵引,此产品用软性材料制成,上面有魔术贴可以用来调节松紧。适合腰部全形,贴身,舒适,拉力均匀,避免皮肤损伤,可持重25-40公斤。

2. 产品规格:

大号长105厘米,中号长97厘米,小号长90厘米。

3. 使用方法:

- 1、将腰椎牵引带两片分开,分别系于两端床头上(可用绳索连接牵引带子)。
- 2、患者躺在床上,将两片牵引带分别系牢固定在腰部、胸部,身体应尽量向上挺伸,将牵引带拉紧(系于床头的带子长短须一致)另一头加重物来调牵引力的大小根据医生建议选择合适的力度。
- 3.每天睡前牵引一次,时间以20-30分钟为宜,牵后即平躺休息,患者也可根据自己需要灵活调整时间和次数.10天为1疗程,2-3个疗程可明显见效,希望患者能够坚持牵。

4. 腰椎牵引带注意事项:

- 1、固定胸围带时,身体应尽力向上挺伸,胸围牵引带拉紧,以免无效牵引行程过长而影响效果。
- 2、牵引力量应以能忍受为宜,勿过度牵引,造成不良后果。
- 3、牵引完毕后,应卧床休息30-60分钟,以保证牵引效果。
- 4、牵引后,颈部或腰部若有酸困不适,疼痛感觉,卧床休息后自行消除。