

康复专用手指畸形矫正多款（成人、儿童）

产品名称	康复专用手指畸形矫正多款（成人、儿童）
公司名称	陈志宏（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	品牌:枫林家 型号:FL-022
公司地址	中国 北京市 丰台区马连道南口万丰基大厦602
联系电话	86 010 57119049 13121312726

产品详情

品牌 枫林家 型号 FL-022

适用人群：

偏瘫、脑瘫、四肢瘫等手痉挛患者。

用途：

用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。分指板能够帮助患者将手指分开伸展，达到抑制手指屈曲紧张，防止手指挛缩的目的。带万向轮的分指板，还可以通过手随分指板的滑动，锻炼肘关节的内收和外展，以及肩关节的活动。

使用方法：

使用分指板，需把手指分别放到分指块之间的指槽内，使5个手指呈分离状态，用固定带把手掌固定，保持一段时间。经常坚持训练，可以防止指间关节挛缩变形。因为训练中手指呈伸展状态，所以这种训练也可以防止手的屈肌挛缩。使用塑料分指板，需用多条固定带把各个手指和手掌固定到塑料底板上，使手指呈分离、伸展状态。如果是便携式，可在夜间和休闲时使用，能保证足够的使用时间，有利于取得较好的预防、矫正效果，对防止偏瘫的“钩形手”十分有用。

使用提示 1、使用时，将手指分开伸展，保持手指在正确的伸展位。

2、手指重度屈曲紧张者可由他人帮助完成；中轻度屈曲紧张者，提倡交给方法，鼓励自行完成穿戴。

3、穿戴分指板时间在20分钟左右时应予以取下，观察手指挤压处有无压痕产生。

请朋友在货物送达后，先拆开包装检查下，在货物无损坏的情况下再签收。

（没检查而直接签收的朋友，如货物有损坏，本公司不承担任何责任）

（如在运输过程中损坏的货物，只要您没有签收，本公司将让运输公司进行赔偿）

店主温馨提示：

目前国内网购市场正在飞速发展，各种行业不同级别的卖家越来越多。在这种情况下就有许多卖家纷纷以低价来吸引消费者的眼睛。可是在这种低价的背后，难免就有很多消费者会担心产品的一系列售后服务问题了。买正规公司的产品售后服务方面比较完善了，但是产品价格相比有些公司要高出很多，这时你就处于一个两难的选择了。而本公司将让你彻底摆脱这种烦恼，在低价格的基础上，同样让你拥有星级的服务！