

A黑龙江腰椎间盘突出牵引带？腰椎可调支具腰椎矫形器胸腹部固定带

产品名称	A黑龙江腰椎间盘突出牵引带？腰椎可调支具腰椎矫形器胸腹部固定带
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

A黑龙江腰椎间盘突出牵引带腰椎可调支具腰椎矫形器胸腹部固定带腰椎牵引带生产厂家

腰椎牵引带简介：

主要用于腰椎骨折牵引，腰椎骨质增生牵引，腰椎盘突出症的牵引，此产品用软性材料制成，上面有魔术贴可以用来调节松紧。适合腰部全形，贴身，舒适，拉力均匀，避免皮肤损伤，可持重25-40公斤。

腰椎牵引带注意事项：

- 1、固定胸围带时，身体应尽力向上挺伸，胸围牵引带拉紧，以免无效牵引行程过长而影响效果。
- 2、牵引力量应以能忍受为宜，勿过度牵引，造成不良后果。
- 3、牵引完毕后，应卧床休息30-60分钟，以保证牵引效果。
- 4、牵引后，颈部或腰部若有酸困不适，疼痛感觉，卧床休息后自行消除。

产品规格：

大号长105厘米，中号长97厘米，小号长90厘米。

使用方法：

- 1、将腰椎牵引带两片分开，分别系于两端床头上（可用绳索连接牵引带子）。
- 2、患者躺在床上，将两片牵引带分别系牢固定在腰部、胸部，身体应尽量向上挺伸，将牵引带拉紧（系于床头的带子长短须一致）另一头加重物来调牵引力的大小根据医生建议选择合适的力度。
- 3.每天睡前牵引一次,时间以20-30分钟为宜,牵后即平躺休息,患者也可根据自己需要灵活调整时间和次数.10天为1疗程,2-3个疗程可明显见效,希望患者能够坚持牵。