

肩胸部约束带使用

产品名称	肩胸部约束带使用
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:均码 材质:复合布 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

『产品名称』：胸腹部约束带

『产品规格』：均码，特殊规格可加工定做

『性能特点』：约束带是一种保护病人安全的装置，用于躁动病人有自伤或坠床的危险，需要固定身体某一

部分时，限制其身体及肢体的活动。

『适用范围』：安置和约束在治疗中躁动或不合作病人，并能防止意外发生。

『使用方法』：将约束带绑带（织带使用汽车安全带）向外平铺在手腕或脚腕下面，复合布用力粘在一起，

魔术贴穿入塑料二连回粘，力度以病人手脚脱不出为准，绑带另一端固定在床帮或者床头上面，本品采用工

程塑料插扣设计，方便医护人员使用。

医用胸部腰部约束带 医用护栏固定带 可调节 举报中心 1.约束带使用的目的 对可能自伤的病人限制其肢体活动，保证安全。保证躁动病人治疗护理的顺利进行。（避免拉扯身上的治疗管路如：动静脉通路、鼻胃管、氧管、导尿管、引流管、气管插管等）2.约束带适用人群 1、重症（ICU）无意识的卧床病人；2、认知障碍、行为紊乱病人；3、评估有摔倒危险的病人；4、精神错乱有损伤自己或他人倾向的病人；3.约束带使用注意事项 1、使用约束带时，松紧适宜，并注意保持病人肢体处于功能位；

- 2、严密观察约束部位的皮肤、末梢循环情况；
- 3、如为制动措施，病情稳定或治疗结束后，应及时解除约束；
- 4、需要长时间约束者，应每2小时松解约束带1次并活动肢体，同时协助病人翻身；
- 5、记录约束的原因、时间、约束带的数目、约束部位及皮肤状况（针对病房护理）；
- 6、解除约束的时间，并做好交接班(针对病房护理)。产品可以直接清洗，反复用。