

自粘型理疗电极片

产品名称	自粘型理疗电极片
公司名称	河南东璧医疗设备有限公司
价格	8.00/袋
规格参数	品牌:东璧 型号:DJ-III型 产地:郑州市
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路相济路
联系电话	15093213211 15093213211

产品详情

理疗电极片，医用自粘导电电极具有导电性能良好，与皮肤附着力强、安全可靠、可重复使用等特点，适用于各类高、中、底频医用家庭保健理疗仪器。我司可以根据客户的要求，设计制作不同规格尺寸的电极片。可根据客户需求设计外观、丝印商标及图案！

理疗电极片使用方法：

- 1、使用本品前，先清洁要粘贴的部位。
- 2、撕开包装袋，将本品与中（低）频治疗仪的导线连接好，揭开护胶片，将粘胶片直接粘贴于所需部位。
- 3、打开机器开关，按治疗仪的说明书操作机器。使用完后先关掉开关，再取下粘胶片存放好，以备下次使用。

理疗电极片适用范围：

理疗电极片可用于颈部、腰部、腿部等身体其他部位，适用于腰肩颈椎综合征，腰椎综合征及腹部、腿部减肥和健美等等。

本产品专用于中低频腰部理疗仪，头部按摩器等产品上。

注意事项：

- 1、本品可多次反复使用（建议专人专用，避免多人混用）。
- 2、若粘胶片的粘性下降，用清水冲洗一下凉干后即可重复使用。

3、贮藏：在阴凉处保存。

4、导电电极片使用寿命一般为5-20次。

5、切记不可直接将胶片直接接触在干纸等吸水能力强的物体上，如果不小心粘帖上，尽快用清水冲洗取下。