

一次性理疗用体表电极

产品名称	一次性理疗用体表电极
公司名称	河南东璧医疗设备有限公司
价格	8.00/袋
规格参数	品牌:东璧 型号:DJ-III型 产地:郑州市
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路相济路
联系电话	15093213211 15093213211

产品详情

适用范围：配合中、低频理疗仪、中医定向透药仪使用。

使用方法：取出电极片，揭开保护膜，将电极片贴敷于需贴敷的部位。

在骨科中针对的病症有：颈椎病、胸椎、腰椎间盘突出、肩周炎、骨质增生、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、坐骨神经痛、腰腿痛、膝肘关节、手指、足趾扭挫伤、跌打淤痛、运动创伤、落枕、扭伤、脚后跟骨质增生、急慢性扭伤、挫伤等骨关节病。

配合药物导入。微孔型无纺布背衬，可与人体皮肤同呼吸，与皮肤附着力强，具有安全可靠，使用方便，免去扎带捆绑的繁琐程序，减轻医生的工作量，在康复理疗科、骨伤科、神经科等广泛运用。

注意事项：

1. 本品为一次性使用；
2. 本品应在医生指导下使用；
3. 使用中若有不适或偶有皮肤表皮发红，应暂停使用；
4. 皮肤受损、大面积溃破者禁用。

使用提示

- 1、贴片所贴的部位，不能有汗水、水滴和脏污。
- 2、将自粘电极片与导线连结上。

- 3、使用前先撕开粘片上的隔离膜。
- 4、将自粘电极附到需治疗的部位或相应穴位并压紧。在粘贴的穴位处用酒精擦一下，待酒精挥发后粘贴，酒精具有消毒、去污及增强电疗的效果；
- 5、治疗结束后，将电极与线分开，盖上保护膜片。
- 6、粘力不足时，可用清水清洗表面，污物去除后，晾干，可恢复粘贴力。