

# 富林(Folee)雾化器空气压缩式雾化机

产品名称	富林(Folee)雾化器空气压缩式雾化机
公司名称	泰安至善堂大药房药业有限公司
价格	159.00/台
规格参数	富林:
公司地址	泰安市马庄镇大坡路
联系电话	15805386806 15805386806

## 产品详情

注意事项 请仔细阅读注意事项,以免对您造成不必要的影响。雾化药液的选择

使用药液进行雾化谨遵医嘱;药剂量不得超过最大容量刻度;浓稠药液可能会降低雾化速率,延长雾化时间。雾化器运行模式 连续运行(连续工作4小时以上)。过滤棉更换 过滤棉建议每使用三个月更换一次,如发现过滤棉潮湿,需完全晒干后使用。更换时,拉出主机上过滤盖,然后进行更换。使用后如何保养 雾化完成后,将面罩、连接管、咬嘴、雾化杯盖、雾化挡板等全分离,用纯净水冲洗或浸没在温水中15分钟。清洗完毕后,需待所有附件晾干后再存放。

注:不得煮洗或沸水清洗面罩、连接管及雾化挡板等,以防受热变形。