

# 医用甘露醇加温箱现货

产品名称	医用甘露醇加温箱现货
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

医用甘露醇加温箱现货用于手术室，ICU，输液科等科室药品液体恒温加热，预热，保温，例如：甘露醇、透析液、生理盐水，冲洗液，造影剂，碘伏，被服等加温保温，减低在使用过程中由于物品过热或过冷而增发的风险。医用甘露醇加温箱现货产品参数简介，如需更多详细资料温度：2 ~48 /0 ~100（2款可选）每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；，请联系医用甘露醇加温箱现货2-48度系列资料介绍：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警、安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板喷涂，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。医用甘露醇加温箱现货0-100度系列介绍

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，在0-100 内可随意设定需温度，数字式显示，显示分辨0.1，读数方便，控温精度高。
- 6、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外
- 7、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 7、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 8、此产品可做嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 9、箱体外壳均采用A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。
- 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

医用甘露醇加温箱现货

恒温箱使用说明

- 一、恒温箱适用于手术病人静脉注射液及冲洗液的加温。
- 二、放入液体前仔细阅读液体使用说明书，不适宜加热的液体不能放入。
- 三、恒温箱根据加热液体的加温温度要求设定温度，不得随意调节温度，以避免箱内液体温度过热。
- 四、加热液体使用前应严格检查恒温箱温度显示及液体温度，以防恒温箱出现故障导致病人热损伤。若恒温箱出现故障应立即停止使用并报告师傅及时。
- 五、取放顺序：从左侧取出，右侧放入。
- 六、每天夜班护士负责次日手术恒温液体的更换与补充。手术途中是否需要补充可视当天手术而定。