

医院手术室加温箱 医用恒温箱

产品名称	医院手术室加温箱 医用恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意电器有限公司是二十一世纪的新兴企业，是集科研、开发、经营、销售为一体的科技型企业，是经营医疗、实验、教学分析、等恒温保存设备的，企业拥有众多高素质，高水平的科研人才和 优异的经营设备，产品优良各大医疗及实验室单位。全体员工始终奉行“团结，务实，开拓，”的企业精神，立足广大用户，愿与社会各界竭诚合作，共同发展。

手术室加温箱 医用恒温箱临床用途--

输注、冲洗接近体温液体很大程度上减少了手术对体温的影响，降低了术后寒战的发生率。手术室液体加温箱，主要用于手术室、ICU、急诊室、妇产科或其他相关场。用于加温液体、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液37度，提升了手术室护理质量,深化了护理内涵，更好的于病人。

手术室加温箱 医用恒温箱使用案列图片

手术室加温箱 医用恒温箱参数：

产品型号 容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48

外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48

外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48

外型尺寸:595*680*1805mm-----型号:FYL-YS-828L

828L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L

温度:2~48

外型尺寸:1267*680*2105mm-----型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L

温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100

外型尺寸:595*675*1795mm-----

手术室加温箱 医用恒温箱使用方法：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体包装完好不破损。3、放入后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体的使用量和液体的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

手术室加温箱 医用恒温箱临床相关:体温过低时，将导致周围管收缩、静脉瘀滞，循环量减少、缺缺氧，进而造成糖酵解途径增加，乳酸堆积，重则形成深静脉栓，引发一系列并发症。当体温达到34度时，还会加速小动脉和小静脉的栓形成。低体温会降低外周单核分泌因子的活性，抑制中性粒的氧化杀伤，减少多核白向感染部位的移动，从而导致免疫力降低，细菌移位，出现感染症状。此外，低温可抑制的活性，使小板数量减少、功能受到抑制，并且纤维蛋白溶解系统，从而导致-时间延长，增加患者术中的-量和对输的要求。严重低温甚可导致DIC。一般来说，预防纠正低体温措施简单，并且效果显著。先，医生要了解低体温的诱因，对症处理。对于接台手术，要为患者补充够的能量，对于存在基础疾病的老年患者，尤其要更加注意这点。其次，我们应该控制手术室温度。有研究表明，将手术室温度统一调25，相对湿度调50%~60%，可以明显降低术中低体温的发生，但由于对穿着厚厚手术衣的术者来说，这样的温度相对较高。因此，在手术室优良适温度到底是多少这个问题上，尚未一致的意见。为了解决这个问题，我们可以为患者单独建立温度微环境：利用隔热毯、隔热垫、手术辅料加温（被服加温、手术器械加温）。另一个方法，就是为患者体内加温，利用恒温加热设备对输注、冲洗的液体进行加热，但是这个方法不适用于浆和蛋白制品。目前，各大都采用对于术中辅助物品，进行加热的方法来预防低体温症的发生，对于医务工作者来说，这个方法是优良方便快捷且安全的。现在隔热毯使用较少，因为存在很大的安全隐患，取而代之的是将术中要使用的被服进行加温，安全。