

嵌入式甘露醇恒温箱

产品名称	嵌入式甘露醇恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

嵌入式甘露醇恒温箱\甘露醇恒温柜\福意联恒温箱?由福意联业生产。主要用于甘露醇的恒温保存及容积。北京福意电器有限公司是国内专 的恒温产品研发和制造公司。公司质量管理规范严格，通过ISO 9001和3C认证，有产品均通过欧盟CE认证。福意联有志于将国学文化的传承与西方技术的汲取融合发展，力争成为“新概念国货”的中坚力量。打造一支具有“业化、职业化、国际化”高素质的精英团队，竭力探索出一条跨界创新 中国智造的新路径！

甘露醇恒温箱加热溶解前确认结晶甘露醇，瓶体无裂缝，在有效期内，然后根据甘露醇恒温箱体积大小放入相适应数量的甘露醇竖放于箱内，启动甘露醇恒温箱，调节温度加热后，体积小的结晶可基本溶解，体积大的结晶明显缩小，再用力摇晃时结晶容易溶解。如结晶较多或较大加热短时间未完全溶解的，在放入甘露醇恒温箱内高温存放数小时后，结晶即可完全溶解。溶解后待甘露醇结晶溶解液体温度与体温相近后使用。

甘露醇恒温箱技术参数产品型号:FYL-YS-151L	产品型号:FYL-YS-281L
产品型号:FYL-YS-431L额定电压:AC220V	额定电压:AC220V
额定电压:AC220V额定输入功率:120W	额定输入功率:160W
额定输入功率:200W有效容积:150L	有效容积:280L
有效容积:430L温度范围:0-100	温度范围:0-100
温度范围:0-100 箱体尺寸:595 × 565 × 860mm	箱体尺寸:595 × 565 × 1440mm
箱体尺寸:595 × 675 × 1795mm内部尺寸:504 × 487 × 634mm	内部尺寸:504 × 487 × 1215mm
内部尺寸:504 × 598 × 1570mm-----	
型号：FYL-YS-150L温度：2～48 尺寸：595 × 570 × 865mm(每度可调控)	型号：FYL-YS-230L温
度：2～48 尺寸：595 × 590 × 1215mm(每度可调控)	度：2～48 尺寸：5

95 × 570 × 1445mm(每度可调控)型号：FYL-YS-310L温度：2 ~ 48 尺寸：595 × 695 × 1315mm(每度可调控)型号：FYL-YS-430L温度：2 ~ 48 尺寸：595 × 680 × 1805mm(每度可调控)-----
-----型号：FYL-YS-151L温度：0 ~ 100
尺寸：595 × 565 × 860mm (每度可调控)型号：FYL-YS-281L温度：0 ~ 100
尺寸：595 × 565 × 1440mm(每度可调控)型号：FYL-YS-431L温度：0 ~ 100
尺寸：595 × 675 × 1795mm(每度可调控)

甘露醇恒温箱用途：甘露醇熔点高,性质稳定,但冬季容易结晶,细小的结晶 易堵塞肾小管,造成肾小球滤过率下降和肾小管内压增高,如冬季输注前不加热溶解,会有大量的微粒在短时间内进入静脉,可能引起血栓或静脉炎,影响临床应用.故冬季甘露醇应在加热后,无结晶的情况下使用.福意联甘露醇恒温箱，作为新型溶解甘露醇结晶设备，37~42度的环境里进行溶解，或25~27度的环境下保温，
大方便解决甘露醇结晶溶解问题，提升护理工作者的工作效率，已经在国内各大医院广泛使用。

甘露醇恒温箱使用方法：1、首先确认甘露醇恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、确认甘露醇结晶程度，如果甘露醇结晶比较严重，已形成絮状结晶或块状，需要42度以上温度进行溶解，等完全溶解后把温度调为37度恒温保存；如果甘露醇没有结晶现象，只需要37度恒温保存，防止结晶及使用。3、根据箱体大小放入相应的甘露醇瓶数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保甘露醇瓶完好不破裂现象。4、使用者应根据甘露醇用量和甘露醇结晶情况来合理安排放入甘露醇的数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

1、售前服务提供及时、完善的技术及商务咨询；根据客户的需求推荐 合适的产品咨询。2、售中服务提供完备的技术资料（使用维修手册，相关国家标准等）；3、售后服务定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案；对有福意联产品实行国家三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，牌服务铸就卓越品质，我们将竭诚为您服务！