

# 儿科医用退热贴厂家 退烧贴批发 退热贴怎么用

产品名称	儿科医用退热贴厂家 退烧贴批发 退热贴怎么用
公司名称	日照市海旭医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海旭 生产单位:日照海旭医疗器械有限公司 产地:山东菏泽单县
公司地址	荣盛国际时代A座13A
联系电话	18678567207

## 产品详情

小儿退热贴是通过凝胶中水份汽化将体内的过多热量挥发出去，从而达到降低体温的效果让儿童健康安全降温，同时不破坏儿童体内的免疫功能系统反应。它属于物理降温用品，因其退热快，降温效果好，安全无毒副而被广泛运用于小儿发热发烧。

使用方法如下：

- 1、沿缺口撕开包装袋，取出贴片，揭开透明薄膜，将胶贴面紧贴于额头、脖颈、太阳穴或其他需要降温、冷敷的部位;可根据需要剪成相应大小使用;
- 2、为加快降温速度，可加用数贴同时贴在人体左右颈总动脉、左右腋下动脉、左右股动脉处;
- 3、本品用于物理降温，如高温持续不退，应请医生诊治;
- 4、居家备用时，放入冰箱冷藏室冷藏后再使用，冷却效果更佳(勿放入冷冻室)。

