

# 下肢牵引带如何使用下肢皮牵引带使用方法

产品名称	下肢牵引带如何使用下肢皮牵引带使用方法
公司名称	安平县世恒医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:世康恒达 产品规格:大、中、小号 产地:河北安平县
公司地址	安平县徘徊村西300米处
联系电话	15531857117 18617909888

## 产品详情

下肢牵引带按材质可以分为帆布型、复合布型、尼龙型

下肢牵引带规格：大号、中号、小号

下肢牵引带组成：复合布、织带、木块、金属挂钩

下肢牵引带使用步骤：

- 1、清洁皮肤
- 2、将皮牵引带放置旁边
- 3、一手紧握住肢体远端，一手放置膝下，沿纵轴方向牵引患肢。
- 4、另一人将皮牵引带放置患肢下方，上面垫毛巾（平整、均匀）保护皮肤。
- 5、轻轻放下患肢
- 6、牵引带下方置于踝关节上2厘米。
- 7、先包小腿两侧牵引带正对内外踝，再包裹大腿。
- 8、患肢下方放软枕。
- 9、连接牵引绳反牵引力量牵引。

10、保持有效牵引，患肢呈中立位，下肢与牵引绳保持同一条轴，牵引沙包悬吊