

一次性消化道吻合器

产品名称	一次性消化道吻合器
公司名称	江苏芸众医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡惠山经济开发区惠山大道1719-1号1号楼四层A区
联系电话	0510-82300262 15052139206

产品详情

一、产品性能

一次性消化道吻合器主要用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。

在消化道重建手术中，医生应用管型消化道吻合器可以做端对端吻合，比如低位前切除乙状结肠直肠端端吻合；还可以做端对侧吻合，比如全胃切除食管空肠吻合；

又可以做侧对侧吻合，比如Billroth

II手术胃空肠吻合。根据吻合器钉砧头外径（单位：毫米），有4个规格型号，分别为21，25，28，32。

在胸外科做食管手术时，从创造最适当吻合口内径角度出发，医生有更多管径吻合器的选择。

二、产品特性

1、大内径：最大切割吻合口内径（25号：17mm），有效防止吻合口狭窄。

2、低矮钉砧头：容易放入肠腔和退出吻合口，避免对肠壁和吻合口损伤。

3、CTC结构：组织压缩厚度可调（CTC），具有宽泛的（2.2-1.0mm）缝钉成型高度。

4、联体穿刺器：简化吻合操作流程，方便低位保肛双吻合技术。

5、安全：击发保险钮装置，操作更安全。

6、听触觉反馈：可拆卸的钉砧头设计，特别切割垫圈，良好的听触觉反馈。

三、产品优势

1、灵活度

根据缝合组织的厚度，控制对组织机械压迫的程度

组织压缩厚度可调，可以满足缝合薄至1毫米，厚至2.2毫米的组织

放大的指示窗，让调节缝钉成型高度更准确，更好操作

更宽泛的荷包缝扎区域，方便荷包打结，防止荷包松动

2、可靠性

切割垫刀圈，让击发操作产生良好的触、听觉反馈

切刀和推钉器一体化，提高切刀同心度，切割吻合更稳定

保险装置，只有在指示针进入绿色指示窗，才能打开保险，防止误操作

3、性价比

器械可以调节，减少了缝钉成型高度，就减少了缝钉成型固定高度的产品规格型号，简化了订单操作，减少了库存空间和存储成本。

四、产品特点

- 操作简便、迅速，大大地缩短了手术时间；
- 准确、牢固可靠，保持良好血运，组织愈合更加保证，
- 有效防止渗漏，明显减低了吻合口漏的发生率；
- 使术野狭小，部位较深的手术操作困难的缝合和吻合变得容易；
- 将手术操作的开放式缝合或吻合变为密闭式缝合和吻合，使消化道重建及支气管残端闭合时污染手术视野的机会减少；
- 可进行交叉重复缝合而避免血供和组织坏死；
- 使腔镜手术（胸腔镜和腹腔镜等）成为可能，如果没有各种腔镜缝合器的应用，电视胸腔镜和腹腔镜外科是不可能开展的；
- 杜绝感染：本品为一次性使用，专人专用避免二次使用带来的交叉感染。

若有您感兴趣的产品想了解更多的产品信息，欢迎随时拨打我们的热线电话！