

绑带指环鞍状刺激电极Bipolar Bar Electrodes Two Touchproof Connectors

产品名称	绑带指环鞍状刺激电极Bipolar Bar Electrodes Two Touchproof Connectors
公司名称	青岛柏恩鸿泰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰诺康 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区渭南路917#乙2层
联系电话	0532-86959323 18562862572

产品详情

泰诺康神经传导电极绑带指环鞍状刺激电极

产品名称：[神经和肌肉刺激器用体表电极](#)

规格型号：BS型（绑带鞍状型）：BS-S2、BS-S5、BS-S3、BS-T2、BS-T3、BS-T5、BS-400

SR型（弹簧指环型）：SR-2、SR-3、SR-5

WR型(钢丝指环型)：WR-2、WR-3、WR-5

SS型（小刺激型）：SS-SW1

SF型（表面电极型）：SF-C1

B型（绑带型）：B-B1、B-S1

P型（贴片型）：P-SW1、P-SW2、P-C1、P-S1、P-AC1

【结构组成】：由导电材料和连接线组成。

【适用范围】：用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。

【使用说明】：

(1) .BS、SR、WR、SS、SF型：一端与神经和肌肉刺激器连接，另一端接触受试者皮肤表面（红色为阳极，黑色为阴极），配合神经和肌肉刺激器使用。B型：使用者可根据检测需求选择包含其的上述型号产品，也可单独使用。

(2) .P型：一端与神经和肌肉刺激器连接，另一端贴在皮肤表面，配合神经和肌肉刺激器使用。

【产品性能】

BS、SR、WR、SS、SF、B型:导电阻抗应 2.0 ，误差应不超过标称值的 $\pm 10\%$ 。

P型:导电阻抗应 130 ，误差应不超过标称值的 $\pm 10\%$ 。

注：上述阻值对应1.5 m长导线，当导线长度增加时，对应阻值增加应不大于1/m。

【禁忌症、注意事项、警示】

- 1.装有心脏起搏器、人工耳蜗等植入性医用电子仪器者禁用；
- 2.癌症患者禁用；
- 3.癫痫病患者禁用；
- 4.孕妇禁用；
- 5.治疗部位有创伤、感染或有瘢痕的患者禁用；
- 6.心脏前、后部位禁用；
- 7.与本产品配套使用的神经和肌肉刺激器设备列明的其他禁忌症。

【产品运输】

产品在运输时应防止重压、雨水淋湿、高温受热。

【产品维护和保养方法】

用清水清洁晾干后保存。

【储存方法】

储存在温度 $-10 \sim +40$ ，相对湿度 80% ，无腐蚀性气体、通风良好的环境内。

One end is connected to the nerve and muscle stimulator, and the other end is attached to the skin surface and used in conjunction with the nerve and muscle stimulator

- *Design of shielding wire

- *It can reduce the leakage of stimulus signal

- *Reduce interference

- *One head for three uses