

下肢止血带驱血带 驱血带的使用方法和压力 橡胶皮管

产品名称	下肢止血带驱血带 驱血带的使用方法和压力 橡胶皮管
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:橡胶制品 型号:15*100 产地:安平县欧博康复器材有限公
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

下肢止血带驱血带 驱血带的使用方法和压力

驱血带

材质：弹性良好的橡胶或热塑性橡胶制成

规格：10cm、15cm

特点：该产品是由弹性良好的橡胶或热塑性橡胶制成，颜色多样，长度可根据需要自行裁剪，使用方便，快捷，是手术室常备产品

适用范围：驱血带是四肢创伤外科手术常用的设备，手术时止血，急救止血，可明显减少手术中创口出血，给手术医生提供清晰的术野，减少了术中备血和输血，减轻患者的经济负担

下肢止血带驱血带 驱血带的使用方法和压力

在现场急救中主要使用橡皮止血带和布性止血带。

橡皮止血带是一种特制的橡皮管，在现场可使用橡皮条、自行车内胎等替代。使用时要把止血带放在肢体适当的部位，如上肢要放在上臂中上 $1/3$ 处；下肢放在大腿的中下 $1/3$ 处。先在上止血带的部位垫一层软布，如毛巾、口罩等以保护皮肤。救助者用左手拇指、食指和中指持止血带的头端，右手将橡皮管拉紧绕肢体一圈后压住头端，再绕肢体一圈后将右手持的尾端放入左手食指中指之间，由食指中指夹持尾端从两圈止血带下拉出一半，使之成为一个活结。如果需要松止血带时，只要将尾端拉出即可。