

# 多功能清创机-欢迎了解

产品名称	多功能清创机-欢迎了解
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	超声波频率:130ml/min 脉动压力水流:3000ml/min 安全水压:56kpa
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

“ ” 多功能清创机的创新技术优势

### 设备特点

- 1、适合各种外科伤口的清创、对于急诊外伤，压力清创对各种大面积清创、急救、及各种术前术后的清创，清创迅速、清洗彻底、视野清晰，从而提高手术质量，赢得宝贵时间。
- 2、超声波清创对感染伤口、慢性难愈合伤口处理效果非常明显，如糖尿病足、窦道、瘻道、褥疮、神经营养溃疡、外伤性溃疡，并且防止伤口感染。
- 3、超声波产生的空化效应能有效去除细菌、真菌、坏死组织，正常组织无损害，促进正常组织生长，达到\*清创目的，使药物能迅速进入深层组织。
- 4、给医院提供新的治疗手段，减少医护人员的工作量，加快病床周转率，提高医院、科室效益。
- 5、多功能清创机可降低成本、增加收入，缩短伤口愈合时间，为病人减轻负担、减少病痛，从而获得良好的社会效益和经济效益。
- 6、甲类医保报销。

超声波清创和压力清创可独立工作也可同时工作互不干扰，脚踏开关和手柄开关两种模式。

产品特点：多功能清创机

产品结构

多功能清创机由脉动压力清创机和超声清创机构成，同时还有清洗液预热、负压吸引等功能供用户选配。

工作原理\*清创机多功能清创机

多功能清创机具有快速脉动压力清创和超声波清创及废液回收三位一体之功能。快速压力清创将产生出脉冲压力水，使创伤组织表面在收缩和舒张之间有规律的反复交替出现，冲洗液中的水流气泡破裂产生的推力，将使夹杂在创面的污染物松动地被水流带走。通过冲洗液的多种物理联合作用可达到清除创面的异物，这种清创主要用于大面积开放性创伤。使用中冲洗枪的脉动压力水流在医务人员的操作下可以从任意角度针对性地冲洗创面，大大提高清创的速度和洁净度。超声波清创是将清洗液产生空化效应，使得微水滴形成气泡 增大 破裂，产生出爆破力，当巨量连贯的微水滴形成连续气泡群，在气泡增大直至破裂过程中生成局域高密度的能量波，作用在溃疡组织表面并击碎之，但对于完好的组织没有任何损伤，这种清创主要用于溃疡组织。两种方式的清创交替工作可使创面清理更加彻底、快速。废液回收通过负压吸引，可边清创边回收清创废液，避免污染扩散使工作环境保持清洁。这种冲洗方法明显优于传统的创面处理方式，大大减少借助纱布擦拭的次数、减轻患者的痛苦，大面积冲洗速度快捷、方便、清创时间缩短，深度伤口也可得到清除，避免发生二次污染，固体杂物和液体污染一同被清除，冲洗后的污水容易回收、便于集中处理。

高效，便捷，无论是技术参数还是临床效果都是，清理创面就选‘ ’ ‘ ’ 清创机。