

欧博可调固定肘关节矫形器A黄冈矫形器厂家 前臂超关节限位矫正器A 骨科护具

产品名称	欧博可调固定肘关节矫形器A黄冈矫形器厂家 前臂超关节限位矫正器A 骨科护具
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

欧博可调固定肘关节矫形器A黄冈矫形器厂家 前臂超关节限位矫正器A 骨科护具

1. 肘关节矫形器有哪些功能？

主要功能是固定、支撑肘关节，规格分左右，由OK布、粘布、海棉、可调肘铰链、粘扣、塑料环等制成。尼龙粘带固定强度高，可反复多次使用，扣件采用工程塑料，不易损坏。

。

2. 性能特点：

护肘固定角度为90°和120°，肘关节在0°到120°之间调节限位固定。简单便捷，易于

操作，节省了操作时间。

欧博可调固定肘关节矫形器A黄冈矫形器厂家 前臂超关节限位矫正器A 骨科护具

3. 肘关节矫形器适用范围：

肘关节矫形器适用于肘部骨折，肘关节挛缩，肌力低下，肱骨髁上骨折，尺骨鹰嘴骨折和桡骨小头骨折，肘关节脱位复位后，肘关节不稳定，及其它病变肢体功能位的保持。

4. 肘关节矫形器佩戴方法：

患者取站立位或半坐位，将肘关节固定在屈肘90度，外展大于90度的位置穿戴，穿戴后将带子拉至适合松紧即可，调节刻度时，应把下方的指针调至0度，上方的调至相应刻度即可。

欧博可调固定肘关节矫形器A黄冈矫形器厂家 前臂超关节限位矫正器A 骨科护具

5. 注意事项：

穿纯棉宽松开襟衣服并拉平，以增加透气性和舒适度；

定期检查受压部位皮肤，以防压疮发生；

换衣服取下支具时，要用健侧手扶患者侧胳膊，轻拿轻放，保持位置不变，一定不要移位；

穿上衣服时应先穿患侧，再穿健侧，脱时则相反；

支具佩戴时间、关节开始活动时间以及活动范围，根据临床医生的要求进行。