

# 甘露醇注射液溶解箱

产品名称	甘露醇注射液溶解箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

甘露醇注射液溶解箱；本产品为多用途，可用于保存尚未结晶的甘露醇注射液，以防止甘露醇在较低温度情况下出现结晶；

对于已经出现结晶的甘露醇；热溶解前确认结晶甘露醇瓶体无裂缝，药液在有效期内，先启动机器，调节好所需要的温度，待温度上升至所需要温度后；在根据箱体体积大小放入相适应数量的甘露醇注射液。数小时后，体积小的结晶可基本溶解，体积大的结晶明显缩小，再用力摇晃时结晶容易溶解。如结晶较多或较大加热短时间未完全溶解的，在放入甘露醇保存箱内高温存放，结晶即可完全溶解。溶解后待甘露醇结晶溶解液体温度与体温相近后使用。

【产品型号】 FYL-YS-151L

【噪 音】 42dB(a)

【功 率】 120W

【电 源】 AC220V , 50Hz

【温度范围】 0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm

【有效容积】 150L

【重 量】 64kg

## 【温度显示】LCD数字式

## 【外门锁扣】有

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数方便。
- 6、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 7、采用风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 8、此产品可做嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 9、箱体外壳均采用A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 10、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。
- 11、机器底部采用可固定式PU活动万向轮。

## 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

## 1、关于出货

一般情况下，下单后3个工作日出货，如有特殊情况影响供货，我们会提前与客户协商。

## 2、关于售后

全国范围保修，整机保修期为一年；压缩机保修期三年；

定期回访例查，维护服务；保修期外，提供有偿维修服务（配件成本费用）。