# 欧博跟腱保护靴,A江西新余助行鞋 踝关节固定支具 跟腱靴的使用方法

产品名称	欧博跟腱保护靴,A江西新余 助行鞋 踝关节固定支具 跟腱靴的使用方法
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号(注 册地址)
联系电话	0318-7528214 15533837232

## 产品详情

欧博跟腱保护靴,A江西新余助行鞋 踝关节固定支具

#### 跟腱靴简介:

#### 跟腱靴

又叫跟腱保护靴,助行鞋,医用踝关节固定支具,不同地区叫法也不一样。其属于骨科康复护具类,可替代石膏来使用,起到术后康复保护作用。跟腱靴外带3层叠加鞋垫,每康复一段时间就抽掉一层鞋垫,把3层鞋垫抽完,跟腱就基本恢复了。

欧博跟腱保护靴, A江西新余 助行鞋 踝关节固定支具

#### 跟腱靴使用方法:

使用跟腱靴时把角度调到90度,并把三个后跟锲形垫垫在布套下面。使用一周后,恢复快的可以拆掉底下面的一层跟垫,每一周拆掉一个。

当角度恢复到前脚掌可以上翘时,这时调整靴子的角度,让靴子在一定范围内活动,摆动角度不要太大,一定要小于踝关节的活动范围,这样才能更好的恢复。

拆跟垫要谨遵医嘱,跟据个人的恢复情况来定,避免跟腱拉伸过度再次损伤。

## 跟腱靴种类:

充气式可调跟腱靴,这种跟腱靴内置气囊,根据角度可以调成自己舒适的角度来穿戴;

角度可调跟腱需,不可充气,但是角度可以调节;

充气式跟腱靴,内置气囊,可充气,内部很舒适;

普通跟腱靴,既不带充气,也不带角度调节,但是内部相对于以上3种没有什么特别之处。

### 跟腱靴适应证:

脚踝扭伤损伤; 跟腱断裂; 踝骨骨折断裂; 胫腓骨骨折等。