

# 颈椎病-佩戴欧博高分子颈托 A大理泡沫颈托 医用外固定支具

产品名称	颈椎病-佩戴欧博高分子颈托 A大理泡沫颈托 医用外固定支具
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

## 产品详情

### 颈椎病-佩戴欧博高分子颈托 A大理泡沫颈托 医用外固定支具

高分子颈托产品介绍：

#### 高分子颈托

具有高强度、柔软、轻便、表面光滑细腻的特点。有大、中、小型号，每种型号都有微调空间。一般可使用中号、稍胖或偏瘦的可使用大号或小号。高分子颈托又叫泡沫颈托，发泡颈托，材质相较塑料柔软，舒适度更高。

### 颈椎病-佩戴欧博高分子颈托 A大理泡沫颈托 医用外固定支具

高分子颈托性能特点：

根据人体工程学设计，支撑板与颞骨更吻合，佩戴方便；

可调节松紧；

有效帮助颈椎减轻负荷，分担颈椎的支撑力度。

高分子颈托使用方法：

在人员指导下使用。将支具置于使用部位后，搭扣扣在前部，调整固定。家庭使用，请遵照医嘱。

颈椎病患者戴颈托的问题：

戴颈托可以临时制动，对于缓解症状有好处。但是，也不可长期依赖颈托固定，超过72小时的固定会导致颈椎周围的肌肉萎缩。颈椎病的发病机制来自于稳定性的逐渐丢失以及代偿性的反应。如果肌肉发生了萎缩，颈椎会更加不稳，颈椎病会更加加重。因此关于颈椎病康复，长期坚持颈椎周围肌肉的力量和耐力的锻炼，提高颈椎的稳定性

适合佩戴医用颈托的人群：

神经根型和脊髓型，都是因为神经根或者脊髓受到压迫和刺激导致的，这样的患者戴颈托可以起到限制活动和牵引的作用，减轻局部的和神经根受刺激的状况；

交感型，主要是由于颈椎的异常活动所引起的交感神经受刺激，也就是颈椎不稳引起的症状，用颈托也可以起作用。