

血液病房净化保温柜

产品名称	血液病房净化保温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

为广大的用户提供更的产品和更完，为恒温事业而努力奋斗。福意联公司以的技术、严格的和完带给您品质的保。欢迎惠顾。福意联公司本着“一片丹心、有利社会”的经营理念，努力开拓，积进取，诚信经营，愿与广大客户共同一片洁净的空间。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

福意联公司介绍

坚持“兴业”的创业思想奉行“用户满意”的服务宗旨。以“诚实信用实事求是”为经营之本。福意联公司多次技术的，单位等。众志成城，奋斗不止，灵活创，积进取，我们正以不畏艰辛的敬业精神向设备迈进，全力为的事业做出大的贡献。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦

有活动优惠)

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

-----		型号：FYL-YS-150L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×865mm	型号：FYL-YS-230L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×590×1215mm	型号：FYL-YS-280L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×1445mm	型号：FYL-YS-310L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×695×1315mm	型号：FYL-YS-430L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×680×1805mm	

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

-----		型号：FYL-YS-151L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×860mm	型号：FYL-YS-281L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×1440mm	型号：FYL-YS-431L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×675×1795mm	

福意联公司着眼于未来，随着经营规模不断地扩大，公司制定了“立足北京，放眼国内，发展海外”的战略方针，以为用户提供解决产品方案为服务宗旨，为此我们将不懈努力不断变革取其精华，去其糟粕，与客户一起成长，真正成为客户心目中的合作伙伴。

液病房净化保温柜技术参数和特征

低温，传感器故障等，防止出现意外，保物品安全温感，自动显示箱部温度，便于随时观察箱温度变化风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀合理设计蒸发器，有效制冷面积，提降温速度自动化霜功能，适合地区，外门防凝露技术。

使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不***损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联服务

注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃***损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

福意联公司凭着雄厚的技术力量，的检测手段，严密的，精良的加工设备，在同行业中占有一席之地。我公司严格遵守平等互利，，用户至上的原则，愿为用户提供周到的售前服务：福意联公司我们竭诚为四海宾朋服务，热烈欢迎八方光临。

一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。