

医用保温柜容积150升温控2-48

产品名称	医用保温柜容积150升温控2-48
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联秉承以”开放、、严谨、自律“为核心的企业文化，致力于为公司员工创造、宽松、充满人性关怀的工作；坚持”宁可损失自己的利益，绝不提供劣质产品及服务“的企业价值观，以壮志凌云的雄迈豪情、扎实有序的工作作风、技术品质、的团队，保障客户在信息时代的速路上驰骋。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

福意联公司介绍

公司十多年一直致力于恒温 and 冷藏的发展，公司拥有丰富的人员，强劲的研究队伍，严格的和的顾务；公司始终如一地贯彻，了认可，进一步了福意公司的控制能力。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

----- 型号：FYL-YS-150L
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

----- 型号：FYL-YS-151L
单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L
单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L
单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

福意联公司（Fuyilian）注重产品的设计理念，拥有一支的设计团队，针对不同的产品提供个性化的解决方案。我们相信细节决定品质，每一个零件均经过精心设计，每一个组件均经过严格的，确保在使用中的安全，我们选取的材料均要求，确保产品的符合要求。

医用保温柜容积150升温控2-48 技术参数和特征

故障：温、低温、断电、传感器故障。制冷剂：无氟制冷剂。外箱材料采用冷轧钢板，表面喷粉防静电处理。内胆材料采用PS板材。工作：温度-25 --45 ，湿度额定电压：220V/50Hz,宽电压范围。

使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不***损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联服务

注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃***损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

福意联打造，细微之处见精神，是我们的产品理念。以人为本，人力资源为要，是我们的根基。福意联（）”以德敬人，以诚立人“，我们愿与有志士仁人一道共创更加美好的明天。福意联注于各科室恒温冷藏设备的推广和销售、实验室。

一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。