

弹性绷带 自粘型/非自粘弹性绷带

产品名称	弹性绷带 自粘型/非自粘弹性绷带
公司名称	河南亚都实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:运达 型号:A型、B型 生产企业:河南亚都实业有限公司
公司地址	长垣市蒲西区建蒲西路234号（注册地址）
联系电话	0373-8883000 18238600802

产品详情

亚都医疗弹性绷带有两种类型，一种是A型为氨纶弹性材料制成的氨纶弹性绷带，另一种是B型为非织造布材料制成的自粘性弹性绷带。

亚都医疗弹性绷带用途：

用于对创面敷料或者肢体提供束缚力，已起到包扎、固定作用。

亚都医疗弹性绷带适用范围及科室：

适用于床面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。

适用于骨科、外科等科室。

亚都医疗弹性绷带产品特点：

弹性高，关节部位使用后活动不受限制，不缩水，不会妨碍血液循环或令关节部位移位质料透气好，不会使伤口凝结水汽。

使用方便、压力适宜、透气性好、不易感染、利于伤口快速愈合、无过敏。

自粘性，微力与微力之间相互自粘，无需搭扣，自我固定，不粘毛发、皮肤、衣物

亚都医疗弹性绷带A型弹性绷带使用方法:

- 1、 在需要增加压力或者纤瘦多骨的地方可多包扎些棉套或棉卷，将棉套或棉卷作为衬垫，能够起到保护伤口的作用。
- 2、 戴上防护手套，以免手上的细菌感染到伤口。
- 3、 选择螺旋形缠绕的缠绕方式为宜，缠绕的时候不要过于用力，缠绕时抚平绷带，使之平滑，为了让每层间都得到较好的支撑和黏联，可用手套蘸水后抚平绷带以达到较好效果。
- 4、 包扎时应从底部开始，逐渐向上缠绕，一直包扎到所需的高度。在包扎过程中，应使相邻的两层弹力绷带重叠三分之二左右，否则包扎后不容易平整，每晚入睡前去除。

亚都医疗弹性绷带B型弹性绷带使用方法:

- 1、 握住绷带，观察需要包扎的部位；
- 2、 如果是对脚踝进行包扎，要从脚底开始缠绕；
- 3、 一只手固定绷带一段，另一只手缠绕绷带，从内向外缠绕包裹绷带；
- 4、 进行脚踝包扎时，要将绷带绕成螺旋状，从而能确定脚踝部已经被完全覆盖；
- 5、 必要情况下，可以重复缠绕绷带，注意缠绕时的力度，包扎脚踝部位时，包扎停止在膝盖以下即可，不需要经过膝盖。