

层流病房保温柜容积150升温度2-48度

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 层流病房保温柜容积150升温度2-48度 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | 98846.00/台 |
| 规格参数 | 容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502 |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759 |

产品详情

地球停止的运转，即在提供万物生存之，福意联（Fuyilian）兢兢业业的经营，目的在为企
业创造经营的空间，更深信企业经营之道在于以顾客至上的服务态度，顾客需求，并人才技术与教育之
培育，同心协力积进取谋求顾客代理商及全体员工之共存共荣。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温
保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

福意联公司介绍

公司秉承“诚信”企业与客户之间的桥梁公司资质。自强不息是自立之道，是一种坚韧不拔永
远进取的精神，强调“承担、、超越”。厚德载物是立人之道，是一种坚持“做事先做人”的原则，
讲究“忠诚，责任和价值等同”。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公
司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚
立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦

有活动优惠)

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

| | | |
|--------------|---------------------|----------------|
| | | 型号：FYL-YS-150L |
| 单门单锁，温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm | 型号：FYL-YS-230L |
| 单门单锁，温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm | 型号：FYL-YS-280L |
| 单门单锁，温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm | 型号：FYL-YS-310L |
| 单门单锁，温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm | 型号：FYL-YS-430L |
| 单门单锁，温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm | |

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

| | | |
|---------------|---------------------|----------------|
| | | 型号：FYL-YS-151L |
| 单门双锁，温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm | 型号：FYL-YS-281L |
| 单门双锁，温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm | 型号：FYL-YS-431L |
| 单门双锁，温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm | |

福意联公司各地是国内恒温箱行业较具实力的企业体现了福意联恒温箱“让顾客满意”的服务深得用户的信赖和广泛的严格按照要求制造检测，确保有恒温箱出厂合格。福意联公司秉承“意客思客户至上双赢诚信为本”的宗旨，为社会创造一个的生活而努力，我们将会用产品来说服客户。

层流病房保温柜容积150升温度2-48度技术参数和特征

PTC陶瓷复合加热技术，加热，升温均衡，密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温性能好温感，自动显示箱部温度，多种故障：低温、传感故障、断电三层强度中空玻璃门，门体安全锁设计，箱体采用钢板，经化喷涂工艺，表面色泽柔和实行三包政策，整机质保一年，压缩机质保三年，，服务，我们将竭。

使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不***损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联服务

注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃***损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

”您的要求，我们的目标福意联公司的服务宗旨是：一个企业的文化是公司的灵魂。公司一直秉承：做事一丝不苟、严格要求、把关、稳步发展。我们的座右铭：客户的需要我们的目标。客户的微笑我们的追求。客户的满意我们的荣幸。

一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。