

环保透明剂2.5L

产品名称	环保透明剂2.5L
公司名称	南昌雨露实验器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南昌雨露 型号:2.5L
公司地址	江西省南昌市青山湖区师大南路54号13号楼201室
联系电话	0791-85291260 13767479208

产品详情

，价格实惠，质量有保障，欢迎来电咨询，

咨询：联系人：易慧芳

【产品名称】浸蜡脱蜡透明液

【产品型号】环保型

【包装规格】500ml、2.5L、5L

产品名称	规格	单位
浸蜡脱蜡透明液（环保型）	500ml	瓶
浸蜡脱蜡透明液（环保型）	2.5L	壶
浸蜡脱蜡透明液（环保型）	5L	壶

【预期用途】适用于标本包埋前的透明浸蜡、切片染色前的脱蜡和染色后封片前的透明。

【检验原理】

标本经固定、脱水后需经透明方可浸蜡，标本浸蜡后方可包埋、切片，切片染色前需经脱蜡水化。处理透明、浸蜡、脱蜡的液体称为浸蜡脱蜡透明液。浸蜡脱蜡透明液（环保型）中的异构烷烃和聚丙二醇能与乙醇（或脱水剂）、石蜡相溶。异构烷烃和聚丙二醇能逐渐渗入组织内部并将乙醇（脱水剂）完全挤出，使石蜡能够浸入组织内部（浸蜡），能将石蜡脱去（脱蜡），聚丙二醇能增强异构烷烃溶蜡作用；但异构烷烃因沸点高不易挥发而且无色无味，所以对环境污染极小。浸蜡脱蜡透明液（环保型）正在逐步代替浸蜡脱蜡透明液（经典型）。

【使用方法】

将脱水充分的组织块或染色前的切片浸入浸蜡脱蜡透明液中，视组织块大小透明1~4小时，为透明彻底，可分为两步进行；视切片厚薄脱蜡10~30分钟。

优良工具，优良助手