

助读式血压计 供应血压计 使用更方便

产品名称	助读式血压计 供应血压计 使用更方便
公司名称	合肥和正医疗器械有限公司
价格	268.00/个
规格参数	产品类别:家用血压计 品牌:助读式血压计 型号:zx-40/300
公司地址	中国 安徽 合肥市瑶海区 合肥市凤阳路恒丰大厦 711 712
联系电话	86 0551 4226338

产品详情

产品类别	家用血压计	品牌	助读式血压计
型号	zx-40/300	动力模式	电动
额定电压	220 (V)	规格	36
自动关闭功能	无	箱装数量	1
产地	西安	测量范围	20 (mmHg)
压力准确度 \pm	22 (mmHg)	脉搏准确度 \pm	5 (%)
适用工作温度	25 ()	排气方式	无排气
显示方式	仪器		

不用听诊器/不用脱衣挽袖/声音提示高低压/可检测心律不齐/可一人自行操作

1.助读式血压计在测量时不需要脱衣挽袖，可以直接隔着衣服进行测量，冬天隔着两三件毛衣测量出的结果也同样准确，使用简单，深受行动不便的老年顾客的欢迎。2.助读式血压计在高压与低压之间会有连续滴滴的电子提示音，第一声提示音对应的数值是高压，最后一声对应的数值就是低压，通过声音提示高低压，让测量更简单、直观，从此可以自己测血压。3.助读式血压计测量时发出的滴滴的电子提示音，它还能准确反映出心脏的搏动情况。提示音急促，说明心动过快；提示音延迟，说明心动过缓，通过对提示音的分析可以判断心率不齐等早期疾病，这是任何电子血压计都无法做到的。4.世界卫生组织（who）唯一认可的测量血压方法是柯式音测量法，目前医院使用的台式水银计就采用该种测量法，台式水银计测量准确，但需掌握一定的使用知识、需配合助听器，使用不方便；助读式血压计也采用柯式音测量法，并对传统水银血压计进行了科学改进，测量更准确，更适合家庭、个人使用。

使用方法：1.仪器准备 打开血压计,使上盖与盖底成为90度夹角(直角)。打开汞开关阀门，给控制盒装入4节五号电池。确认传感器插入控制盒的插孔内。2.测量 将袖带套入胳膊上方,注意袖带及数据线方向,白色圆环向下,对准大臂内侧肱动脉处(参照袖带上示意图).将穿入袖带的手臂平放在桌面上,掌心向上,坐直放

松手臂,肱动脉与心脏成水平。关闭气阀加压,比平时测量血压高出30-40mmhg,停止6秒,打开控制盒开关,缓慢打开气阀,水银柱缓慢均匀下降。当助听器连续第一声鸣叫出现时所对应的汞柱示值为高压(收缩压),最后一个连续提示声对应汞柱值为低压(舒张压)。3.注意事项 助读式血压计可直接隔着衣服测量(冬季需脱掉外套),测量结果同医院测量同样准确;测量时请勿移动气囊及被测量者手臂,加压时缓慢平稳加压,以免助听器出现干扰音;测量前、连续测量时请勿进行剧烈运动,并在休息15-30分钟后进行测量,以免测量结果出现误差。

四大优势中国家用型血压计首选品牌

优势一、原理科学,准确度高 采用国际卫生组织唯一认可的肱动脉柯氏音测量法,也是迄今为止无可取代的唯一科学方法,与医院测量原理完全一致,上万例临床验证,准确率100%

优势二、灵敏度高,测量方便 独家采用国际最新的声纳和空气纳传感技术,灵敏度高,可隔着衣服准确测量,电子蜂鸣提示音洪亮,无杂音,易于监测,特别适合中老年人使用。

优势三、心率监测,一举两得 助读式血压计的电子蜂鸣提示音能准确反映出心脏的搏动情况,对于心动过快、过缓以及心率不齐等早期疾病能够准确反映,这是任何其他电子血压计都无法做到的。

优势四、价格优惠,服务周到 助读式血压计价格只有中档电子血压计的一半,公司承诺:一年包换,终生维修,确保消费者无后顾之忧。