

多功能高氧护理仪，好皮肤“氧”出来！

产品名称	多功能高氧护理仪，好皮肤“氧”出来！
公司名称	广州艾颜佳美容美发设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	艾颜佳:品牌 Y19:型号 广州:地址
公司地址	广州市白云区空港大道嘉大广场北附楼7楼艾颜佳(嘉禾望岗地铁A出口附近)
联系电话	020-62912226 18819361859

产品详情

多功能高氧护理仪原理

多功能高氧护理仪利用电子压缩分离水滤技术产生高氧，配置多功能高氧光吸罩，针对皮肤毛发进行有氧护理。同时，以皮肤构造和细胞营养学为指导，结合彩光氧护、小气泡焕肤、Spa水护、循环渗入、冰封修复等多维度对面部皮肤进行深层清洁、修复、喷氧、补养、焕肤，达到补水补氧，使护理后的皮肤紧致通透、水润光泽。广州艾颜佳美容仪器设备有限公司的多功能高氧护理仪能够帮助爱美人士做深层清洁，吸黑头，去角质，补水补氧，激活细胞，紧致提升，淡化黑眼圈及眼周细纹，收缩毛孔，改善肤质，提亮肤色等。

艾颜佳多功能高氧护理仪9大配件，给你全方位的护理

1、眼部超音波

原理及功效：超音波以每秒一百万次的震荡波所形成的细微按摩，其穿透力可达皮下5-6公分，利用这种按摩刺激皮肤深处的细胞，使皮下深部温热，改善皮下浅表毛细血管的血液循环，提高细胞免疫力结合所使用产品达到深层导入，淡化黑眼圈给眼部肌肤补充营养。

2、面部超音波

原理及功效：超音波以每秒一百万次的震荡波所形成的细微按摩，其穿透力可达皮下5-6公分，利用这种按摩刺激皮肤深处的细胞，使皮下深部温热，改善皮下浅表毛细血管的血液循环，提高细胞免疫力结合所使用产品达到深层导入，改善肌肤营养不良，给面部肌肤补充营养。

3、眼部射频

先进的循环射频技术，通过调整体内细胞自身磁场恢复其自身原有功能，限制脂肪细胞增大的原理，六极射频技术每秒0.8MHz,穿透力在3-8mm之间，直接作用于肌肤底层，协助细胞制造胶原蛋白，重整肌肤纤维组织结构，促进细胞新陈代谢，延缓细胞衰老，使肌肤重新变得紧致光滑，细纹得以淡化，能够有效的改善面部肌肤松弛和皱纹，同时亮白肌肤、深度嫩肤、改善纹理。

4、面部射频

先进的循环射频技术，通过调整体内细胞自身磁场恢复其自身原有功能，限制脂肪细胞增大的原理，六极射频技术每秒0.8MHz,穿透力在3-8mm之间，直接作用于肌肤底层，协助细胞制造胶原蛋白，重整肌肤纤维组织结构，促进细胞新陈代谢，延缓细胞衰老，使肌肤重新变得紧致光滑，细纹得以淡化，能够有效的改善面部肌肤松弛和皱纹，同时亮白肌肤、深度嫩肤、改善纹理。

5、光疗刷

原理及功效：采用彩光和微电相结合，彩光修复肌肤的同时微电所产生的电离子深入渗透皮肤，补充人体生物电能，激活细胞，恢复肌肤弹性从根本上改善皮肤问题。

6、冷头

原理及功效：0度到-5度的制冷令血管收缩，强化蛋白纤维组织，收细毛孔，镇静肌肤，锁紧营养成份。适用于衰老性皮肤，易生皱纹皮肤，水肿皮肤等症状皮肤的护理（改善红血丝、皱纹、痘痘）。表皮致冷，安全舒适，解决皮肤衰老根本问题，全面改善肌肤衰老症状。

7、太空面罩

面部补氧提高细胞活性，延缓细胞衰老，改善促进血液循环和新陈代谢，收紧皮肤，祛皱，改善色斑，亮白皮肤，改善暗疮，平衡油脂分泌，改善敏感皮肤，同时吸氧净化内脏。蓝光照射具有消炎杀菌、镇痛作用，红光治疗能增加白细胞的吞噬功能，提高机体免疫力，促进自体消炎，增强血液循环、新陈代谢促进产品的吸收。

8、喷枪

采用低压喷射的原理配合活性浓缩成份的精华液做按摩皮肤清洁亮白保湿，改善各种瘙痒症、敏感皮肤、接触性皮炎、湿疹、暗疮皮肤、日光症等。

9、小气泡

由中间向两侧快速滑动，以涡轮头旋转方式摩擦表皮，使老化变质的表皮细胞脱落，深层清洁，让精华素更容易地导入皮肤组织，刺激皮肤生长层吸氧和血液循环，收缩毛孔，使皮肤变得细腻柔软，富有弹性光泽。

艾颜佳多功能高氧护理仪操作步骤

第一步：面板界面选择小气泡：调节好产品出水量和小气泡笔吸力，选择不同的产品瓶对面部进行清洁。全脸操作时间4-5分钟；

第二步：面板界面选择水氧喷枪，调节好出水量，结合产品做修复和营养补充，全脸操作时间2-3分钟；

第三步：面板界面选择眼部渗入，（能量1-15可调），从1开始使用根据客户感受调节做舒适的能量结合产品做眼部导入，全脸操作时间4-5分钟；

第四步：面板界面选择面部渗入，（能量1-15可调），从1开始使用根据客户感受调节做舒适的能量结合面部产品做导入全脸操作时间6-8分钟；

第五步：面板界面选择眼部发热，（能量1-15可调），从5开始使用根据客户的感受调节做舒适的能量，全脸操作时间4-5分钟；

第六步：面板界面选择面部发热，（能量1-15可调），从5开始使用根据客户的感受调节做舒适的能量，全脸操作时间6-8分钟；

第七步：面板界面选择彩光头，（能量1-15可调），从5开始根据客户的感受调节做舒适的能量，全脸操作时间6-8分钟；

第八步：面板界面选择太空面罩，（能量1-15可调），从5开始根据客户的感受调节做舒适的能量，全脸操作时间20分钟左右；

第九步：面板界面选择冷头，全脸操作时间4-6分钟。