

康致捷厂家批发2.5L润滑防锈剂手工上油医疗器械润滑剂高效浓缩润滑剂

产品名称	康致捷厂家批发2.5L润滑防锈剂手工上油医疗器械润滑剂高效浓缩润滑剂
公司名称	德州创一医疗科技有限公司
价格	260.00/桶
规格参数	品牌:创一科技 规格-1:600ml*20瓶/件 规格-2:2.5L*4桶/件
公司地址	平原三唐政府驻地
联系电话	15621268889

产品详情

康致捷--创一科技TM高效浓缩润滑剂

【产品说明】本品为水溶性乳化天然矿物油，采用医用油以及人体能接受的乳化剂配伍，不含石蜡和有机硅。

【使用范围】适用于全自动喷淋式清洗消毒器、长龙清洗消毒器、牙科专用清洗机及人工对以下物品的润滑上油：

外科手术器械 不锈钢器具 牙科手机及器械 微创器械 仪器设备等。

【性能特点】在器械表面形成保护膜；低泡、高效、快速；适用于全自动清洗设备；适用于手工上油；对灭菌效果无影响；无毒害、无腐蚀、无残留；使用温度为常温至95℃。

【用法用量】1、自动清洗消毒器上油的使用：

自动加注使用；在后一步漂洗阶段使用；加注稀释比例1:100-1:250；加注温度常温至95℃。

2、人工手动上油的使用：

器械必须尽量打开；使用纯净水或去离子水稀释；与水稀释比例1:20-1:25（对生锈严重的器械，可在除锈后用原液润滑）；

将完全打开的器械浸没于稀释液中至少30秒；对于器械关节处，可浸在稀释液中活动关节；拿出

器械，待水珠自然滴落，无必要再进行漂洗或擦拭。

【注意事项】 外用不可口服；请勿与皮肤直接接触，防止溅入眼睛，如不慎接触，请立即用清水连续冲洗；手工上油时，需戴手套操作；使用前请勿与水和其他介质接触，使用后请将瓶盖拧紧；稀释液长使用时间7天，如器械数量较多，建议一用一换；避光密闭、置于阴凉干燥处保存。

【有效期】 24个月

【规格】 200ml/瓶、500ml/瓶、600ml/瓶、1000ml/瓶、2.5L/桶、5L/桶

【执行标准】 Q/371426DZCY014

【企业名称】 德州创一医疗科技有限公司

【地址】 山东省德州市平原县三唐乡政府驻地小刘沟南段路西

【邮政编码】 253107