

分娩体验仪体验感受品质售后无忧「多图」

产品名称	分娩体验仪体验感受品质售后无忧「多图」
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

产品详情

武汉医捷迅安商贸是一家为医院提供全套设备与服务的供应商，给您提供、便捷、安全的医疗产品与服务！本公司一直致力于器械领域的开拓，为医院提供品种齐全的、 、 类器械及设备配置方案。

分娩疼痛模拟的由来

分娩疼痛体验源自美国电视“the try guys一群体验的人”，Mary

Trump医生用分娩模拟器给四个大男孩做分娩疼痛模拟实验，男孩们在体验过程中饱受折磨，痛苦得几乎无法忍受，实验完毕，大家深刻体会到分娩的痛苦和艰辛，对母亲充满敬意。该节目在美国热播后，分娩疼痛体验被迅速引入国内，并掀起分娩体验热潮。

DL2.1/3.0分娩阵痛体验仪/分娩体验仪/分娩疼痛模拟仪产品简介

1.原理介绍

该产品工作原理为：利用电压会对人体产生刺激作用的原理，分娩体验仪体验感受，将不同大小和规律的电脉冲作用于人体腹部表面刺激人体大脑，从而起到模拟孕妇分娩的效果。

2.安全警告

装有心脏起搏器者禁止使用本产品！

本产品仅适用于身体健康的成年人！

对电过敏者禁止使用！

武汉医捷迅安 品牌经销供应DL-2.1分娩阵痛模拟仪

3.外观与组件

主机

触摸显示屏

按键板

紧急急停开关

外接停止开关

脉冲输出A

脉冲输出B

储物槽

扬声器

电源开关

电源插头（自带1A保险）

组件

导联线X2

外接停止开关

电源线

4.安装与连接

将电源线插入电源插头

分别将两根导联线插入脉冲输出A、B插孔

将外部停止手闸插入外接停止开关插孔

分别将两根导联线的四个贴片贴于体验者腹部，两电极片的距离为7CM左右（若使用硅胶电极片请确保电极片表面湿润）

开关机说明

开机I:打开电源开关

关机:关闭电源开关

分娩体验仪体验感受品质售后无忧「多图」由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。分娩体验仪体验感受品质售后无忧「多图」是武汉医捷迅安商贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。