

# 批发 3M1100耳塞/隔音防噪音 防噪声/学生/出差旅游必备

产品名称	批发 3M1100耳塞/隔音防噪音 防噪声/学生/出差旅游必备
公司名称	张彦华（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	型号:3M1100 材质:高弹性聚脂 连接线:无
公司地址	中国 河南 郑州市金水区 东风路
联系电话	86 0371 60140558 13653861330

## 产品详情

型号	3M1100	材质	高弹性聚脂
连接线	无	颜色	橙色
规格	1100	品牌	3M
噪音降低率	29（分贝）		

品牌：3m名称：标准型无线耳塞货号：1100（注：1盒200副、1箱5盒）

郑重承诺：本公司出售的3m1100耳塞绝对正品，假一赔十！买家可放心，在此提醒买家提防网上低价假的仿的3m1100耳塞.正品3m1100与假、仿3m1100辨别如下：

正品包装字迹清楚，袋较厚有光泽，有5列透光针孔、耳塞无蜂窝孔洞、回弹慢，质量较好；

假仿的字迹模糊，无光泽，无针孔，袋较软，耳塞多蜂窝及孔洞，较软，回弹快，隔音能力低，重复使用次数少，质量较差。

实体店最低都卖3元一对的哦，我们网上直接标的都是成本价了。不要说别家的更便宜，一分价钱一分货哟！我们保证是3m厂家正规渠道的正品行货，假一赔十。

美国3m公司出产的弹性防噪音耳塞,选用高弹性聚脂材料，防噪音效果好

制造商：美国3m公司巴西子公司

供应商：明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司

子弹型轮廓设计,减噪效果好 表面光滑,经防污处理,佩戴卫生,安全。

隔音效果:29db。使用时先把耳塞捏小，在放到耳朵内，耳塞会慢慢回弹密闭耳朵，进而达到防噪音的目的。

频率(赫兹)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	降噪值
真耳衰减量(分贝)	35.0	38.0	37.2	36.7	35.8	40.3	40.7	41.3	42.5	29分贝
标准分布(分贝)	4.7	4.4	3.7	3.4	2.6	3.2	4.1	4.3	4.7	

保证耳塞效果的一种方法是，佩戴防噪音耳塞时要与人的外耳紧密接触，以免声音从耳塞和外耳之间的缝隙进入中耳和内耳。由于每个人外耳的形状各不相同，用一般材料制成大小相同的耳塞，无法实现上述要求。

解决这个问题的途径是，用有弹性的材料制作耳塞，使耳塞具有一定的变形能力，适应不同人外耳的形状。制造这种耳塞的材料弹性必须适当，弹性太大，耳塞膨胀时压迫外耳道皮肤，可引起耳胀、耳痛等不适；弹性太小则不能与外耳道紧密接触，隔声效果降低。现在，已经找到具有这种特性的材料，并用它制成了耳塞，它就是具有慢回弹特性的聚氯乙烯（pvc）泡沫塑料耳塞。慢回弹耳塞用手搓成细条后会在几分钟内慢慢膨胀，逐渐恢复到原来的形状。把搓成细条的耳塞插入外耳道几分钟后，耳塞就可以与外耳道紧密接触。

佩戴这种防噪音耳塞时要上提耳廓，使弯曲的外耳道变直，然后放入搓成细条的耳塞。鉴别这类耳塞质量的方法是观察其回弹速度，回弹时间长的质量比较好。

选用进口高弹性聚脂材料，防噪音又不胀耳。是美国3m公司《防噪音耳塞》专利产品。该耳塞带上没有不舒适感，隔音效果明显，在外面很吵时也觉得很安静，能有效降低29分贝噪声。如果你在旅行，寝室为噪音所困扰，这无疑是你的最佳选择。它将给你一个安静的世界，让你休息好，学习好！

慢回弹耳塞为高弹性聚脂材料，是不可洗的，洗后会影响到隔音效果。

使用方法：（1）搓细：将耳塞搓成长条状，搓得越细越容易配戴。（2）塞入：拉起上耳角，将耳塞的三分之二塞入耳道中。（3）按住：按住耳塞约20秒，直至耳塞膨胀并堵住耳道。（4）拉出：用完后取出耳塞时，将耳塞轻轻地旋转拉出。注意事项：（1）请正确使用耳塞，以求达到最佳使用效果。（2）严禁水洗，否则将使耳塞的慢回弹特性消失而无法配戴。（3）建议使用前将耳道清洁干净，可延长耳塞的使用寿命。

## 隔音耳塞知识

首先强调一点，隔音耳塞、隔音耳罩都是只能降低噪音，而不能完全隔绝噪音的！另外，耳塞佩带方法非常重要，若佩带不正确的话是不能达到很好的效果的。

一、耳塞分类隔音耳塞分2种，发泡材料和硅胶材料，发泡材料(不可清洗)可使用:2个星期左右，硅胶材料(可清洗)使用:半年到一年左右。

二、两种耳塞对比发泡耳塞：舒适性和隔音性好，但使用周期短一些，推荐睡眠使用。硅胶耳塞：佩带方便，可清洗，性价比高，但是睡眠用的话不推荐的。

如果单纯从隔音效果和舒适度上来看，发泡材料的耳塞优于硅胶材料的耳塞  
综上：睡眠时建议用发泡耳塞，对舒适性和隔音性要求比较高的朋友，建议用发泡材质。若是学习，工作时，或者对舒适性要求不高的，可以使用硅胶耳塞。

耳塞适用对象：

- 1、工厂前线工作人员，耳塞降低了机械的噪音，保护了您的听力。
- 2、学生宿舍、职工宿舍或群租人员。同伴的呼噜声、梦话、磨牙等一系列可能会让您翻来覆去，无法入睡，这时，耳塞能帮助您安然入梦。
- 3、住在街道旁边的同志们，隔音耳塞帮助您降低来去车辆的声音。
- 4、由于丈夫或男友打呼噜无法入睡的女士，耳塞或许能够帮你，耳塞虽然不能完全隔绝噪音，但是能有效地降低噪音。
- 5、奋斗在台灯下、课桌前的莘莘学子，也许你喜欢默读、默背，或想静静地思考，但会经常被吵闹的教室打断思维，影响学习。这时，别忘了来副耳塞，轻松带上，不再受他人影响。
- 6、商场的英雄们，你们的日子是在火车，飞机上度过的，好好休息才能好好工作，隔音耳塞会给你一个相对安静的世界。

耳塞小问题:

下面有朋友的疑问,我收集了一下,您可以对照一下.

1、问：耳塞有哪些材质的呢？

答：耳塞根据材料可分：发泡材料和硅胶材料：发泡材料大部分不可清洗；硅胶材料可清洗。

2、问：耳塞能用多久呢？

答：发泡材料（不可清洗）可使用：2星期左右，硅胶材料（可清洗）可使用：半年到一年

3、问：发泡材料和硅胶材料有什么区别？

答：单纯从隔音性和舒适性上来看，发泡材料比硅胶耳塞好。所以，若是睡眠等推荐发泡耳塞。

4、问：用耳塞后就能完全隔音吗？

答：耳塞只能降低声音不能完全隔音。

5、问：耳塞会不会掉进耳朵里出不来了？

答：耳塞的设计很人性化，请放心使用。

使用说明1：由于本产品清洗后影响使用效果，所以使用前请保持双手干净2：取出一只耳塞，用一只手的食指和大拇指将其搓细(越细越好)3：另一只手将要塞入的耳朵向上向外提起(这点很关键)并保持住，然后将搓细的耳塞塞入耳朵中4：用手扶住耳塞直至耳塞在耳中完全膨胀定型(大约要持续三十秒左右)注意事项1：由于耳塞恢复弹性的时间很快，所以用户要确定耳塞被塞入耳朵前是被搓细的，否则无法得到最好的效果2：切记在塞入耳朵前耳朵是被向上向外拉起的这两点如果你能完全做到的话，耳塞就能发挥其最大的效果

表面经防污外理，佩戴卫生。