

欣笑安排卵试纸-单人份,另有早孕检测试纸

产品名称	欣笑安排卵试纸-单人份,另有早孕检测试纸
公司名称	安徽深蓝医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要组成成分:a-LH 性状:试纸条 适应症:排卵检测
公司地址	中国 安徽 合肥市蜀山区 合肥市蜀山区蜀山新产业园蜀山自主创新产业基地6#3层
联系电话	086 0551 5326768

产品详情

主要组成成分	a-LH	性状	试纸条
适应症	排卵检测	规格	1片/盒
贮藏	贮存于 4-30℃ 避光干燥处	有效期	24 (月)
	, 有效期		
	24个月。忌冷冻。		
生产企业	安徽深蓝医疗科技有限公	药(械)准字	皖食药监械(准)字2010
	司		第2400114号

此外为图标欣笑安排卵试纸(促黄体生成素检测试纸)

产品说明书

促黄体生成激素(LH)是随女性月经周期而含量呈周期性变化的激素,其作用是刺激卵巢内成熟卵子的释放。其峰值出现时,LH在女性血液和尿液中大量存在,所以从尿液中测LH含量是诊断是否是峰值的可靠指标。尿LH大于或等于40mIU/ml为该月经周期尿中LH峰值即将出现的标志。

在妇女月经周期中期,LH分泌量急剧增加,形成“LH”峰,峰后48小时内即可促发排卵。因此“LH”峰后1-3天时间内妇女最易受孕,因此使用促黄体激素检测试剂条检测LH在尿液标本中的水平,可以预测排卵时间,从而有效地把握受孕的最佳时机。

【测定原理】

LH胶体金法诊断试剂条采用双抗体夹心一步法技术,以胶体金为指示标记,检测尿液中LH浓度,适用于家庭医疗保健,也有助于诊断和治疗不孕症,提倡优生优育。

【产品名称】通用名称：促黄体生成素检测试纸商品名称：欣笑安排卵试纸英文名称：luteinizing hormone (lh) test strip

【包装规格】

1片/袋；3片/盒；5片/盒；10片/盒；20片/桶；50片/桶、100片/盒

【标本收集】

采用一次性洁净容器收集每天在10:00 am-8:00pm的尿样可以得到最佳结果。切勿采集早晨第一次尿样。尿样若呈可见的混浊状，需先离心、过滤或待其沉淀后取上部清液检测。若不能及时送检，尿样标本可在室温下存放4小时或在2 -8 冷藏可保存12小时。长期保存需冷冻于-20 ，忌反复冻融。

【操作步骤】

在进行测试前必须先完整阅读使用说明书，使用前将试剂条和尿样标本恢复至室温（20 -30 ）。

1. 从原包装铝箔袋中取出试剂条，在1小时内应尽快地使用。
2. 将试剂条按箭头方向插入尿液标本中。注意：尿液液面不能超过试剂条的标记线。
3. 至少10秒钟后取出平放于干净平整的台面上；亦可以不取出，一直放在尿杯中直到读结果。
4. 等待红色条带的出现，测试结果应在3-10分钟内读取。10分钟后判定无效。

【结果判定】

阳性（+）：两条红色条带出现。检测线t与控制线c颜色同样深或者比控制线深，预测24-48小时内排卵。

阴性（-）：检测线t比控制线c颜色浅或只出现一条控制线c，表明未出现lh峰或峰值已过。

无效：质控区（c）未出现红色条带，表明不正确的操作过程或试剂条已变质损坏。在此情况下，应再次仔细阅读说明书，并用新的试剂条重新测试。如果问题仍然存在，应立即停止使用此批号产品，并与当地供应商联系。

注意：试剂条质控线与测试线的色带可因尿中lh含量多少而显现出颜色深浅，结果判定按上述标准进行。

【灵敏度】

本品最低检出量为25miu/ml。

【特异性】

与htsh, hfsh等无交叉反应。

【检测日期的确定】

首先确定月经周期长。月经周期长是指周期开始第一天（月经出血）到下一周期开始前一天的天数。请回忆近几个月以确定平均周期长，然后在下表中圈定平均周期长，读出下面的对应数值（天数），再从本次周期的第一天往后数该数值，所得这一天就是开始检测的时间。

在下表中第一、三行中圈定平均周期长，第二、四行所对应的数值即为往后数的天数。

月经周期	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
检测日期	06 06 07 07 08 09 10 11 12 13
月经周期	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
检测日期	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

注意：如果无法确定平均周期长而采用最短的周期长，则需在检测时多测6天的样品。如果月经周期小于21天或大于40天，请向专业医生咨询。

例如：你的月经周期是28天，上次月经是3日开始的，从上表可查到检测天数是11，即你将从13日开始检测(如下表)。

日一 二 三 四 五 六
1 2 (3) 4 5 6
7 8 9 10 11 12 <13>
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

【注意事项】 1.本品为体外诊断一次性使用。

2.请在有效期内使用。

3.打开包装袋后，请勿将试纸条置于空气中过久，以免受潮。

4.请每天在相对固定的时间进行测试，测试前不宜大量饮水。

5.某些情况可影响测试结果：如妊娠，绝经期，服用激素，类固醇及避孕药物等。

6.不是每个周期都有lh峰值，如未测出请连续监测或向医生查询。

【贮存和有效期】

贮存于4-30 避光干燥处，有效期24个月。忌冷冻。

【注册证号】皖食药监械（准）字2010第2400114号

【产品标准】 yzb/皖0096-2010

【生产许可证号】皖食药监械生产许20100222号

【企业名称】安徽深蓝医疗科技有限公司

【生产地址】安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园振兴路6#3层

【注册地址】安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园振兴路6#3层

【邮政编码】：230031

【联系电话】0551-5326768

【传真号码】0551-5326758