

# 诚招代理商医用绷带

产品名称	诚招代理商医用绷带
公司名称	苏州可耐特医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 吴江市 江苏省吴江市花园路2518号通鼎国际大厦314室
联系电话	86 0537 3281077 18626162568

## 产品详情

### 一 可耐特医用高分子绷带

可耐特医用高分子绷带由玻璃纤维或聚脂纤维涂覆聚氨酯化合物制成，主要用于骨折部位或受伤关节固定，是理想的石膏绷带升级换代产品。动物实验和急慢性毒理试验证实，医用聚氨酯无毒，无致畸变作用，对局部无刺激性反应。

### 二 可耐特医用高分子绷带特点

苏州可耐特医疗科技有限公司生产的医用高分子绷带，剪开绷带的基布，无毛刺,毛边现象；不会对病人皮肤造成刺痛,刺痒的感觉，患者感觉舒服，无不适现象。在玻璃纤维绷带产品中独树一帜，是我公司的专利技术。

### 三、可耐特医用高分子绷带的优点

- 1、舒适安全性：可耐特绷带干燥后收缩性小，不会产生石膏绷带变干后皮肤发紧、发痒的不适感觉，也不会出现石膏在硬化过程中，吸水再结晶时有产热反应,让病人皮肤有烧伤的不适感。
- 2、良好的透气性：可耐特绷带使用了高质量的原纱，独有的网状编制技术，具有良好的透气性，有利于皮肤透气，解决了石膏绷带管式包扎所致的皮肤潮热、瘙痒等问题。
- 3、硬化速度快：可耐特绷带硬化过程快，在打开包装后3-5分钟开始硬化，20分钟就可以承重了，而石膏绷带需24小时左右才能完全硬化承重。
- 4、硬度高、重量轻：经检测，固化后的可耐特绷带硬度是传统石膏的20倍，重量相当于石膏的1/5，厚度相当于石膏的1/3，不仅保证了肢体复位后的固定作用，而且使患处负重小，有利于血液循环和伤口愈合。同一部位的固定，高分子绷带的用料比石膏最少节约1/3。如前臂管型，石膏绷带用量3卷，高分子绷带用量1卷。下肢管型，石膏绷带用量25卷，高分子绷带用量5卷。

5、极好的x线透射性：可耐特绷带对放射线的通透性极佳，x线效果清晰，有利于医生在治疗过程中，随时可以了解患肢的愈合情况。而石膏的透射性比较差，有时只有去除固定后，才能清楚的了解愈合情况。因而避免了有时在石膏拆除后通过x线检查发现未达到愈合标准，而需要二次重新包扎的麻烦。

6、良好的防水性：可耐特绷带硬化后，表面光滑，对水分的吸收率比石膏和一般玻璃纤维制成的绷带和夹板低85%，即使患肢接触水的环境后，也能有效的保证患部干燥。亦不怕二次浸水，可以佩戴绷带进行沐浴和水疗。

7、操作方便、灵活，塑形性好：可耐特绷带只需在常温水中挤压2-3次就可以使用了，操作非常方便。如果固定部位有皮外伤或操作时间长时，可不先浸水，直接进行固定，固定后，可在外层喷洒水来加快硬化速度。塑型性好，弯曲和拉伸强度高，可随意弯曲，可耐特绷带可做成管型、托或者夹板。

8、适用范围广：可耐特绷带和夹板广泛适用于骨科多部位固定，整形外科的矫形具，假肢辅助功能用具，支撑工具及烧伤科的局部防护性支架等。

临床特点对比表：

对患者的好处	对医疗人员的好处	其他
可洗澡和接受药浴	操作方便、卫生	完全透x线
轻盈、舒适、美观	容易塑性	常温水即可激活硬化
安全、透气、清凉	容易去除	20分钟内承受重量
没有过敏反应	伤口留孔容易处理	无毒无化学反应

#### 四、使用方法：

1.根据需要固定的部位，选择合适的规格。2.在固定部位用棉卷或棉套作为衬垫。3.戴上医用乳胶手套。4.打开包装，取出绷带，在常温水中浸泡2~3秒并挤压2~3次，取出后挤去多余水分。5.根据需要呈螺旋形缠绕，松紧度适中，非支撑部位3~4层，支撑部位4~5层。6.根据需要进行塑形，凝固时间3~5分钟，塑形需在此时间内完成，20分钟后即可完全承重。7.用普通的电动石膏锯拆除。

#### 五、规格型号

型号	规格	包装规格
kcf02	5.0cm*360cm	10袋*12盒/箱
kcf03	7.5cm*360cm	10袋*12盒/箱
kcf04	10.0cm*360cm	10袋*9盒/箱
kcf05	12.5cm*360cm	10袋*9盒/箱
kcf06	15.0cm*360cm	10袋*9盒/箱