

小号纯铜面部美容棒 眼部美容棒 0.4mm艾条（精装套盒）

产品名称	小号纯铜面部美容棒 眼部美容棒 0.4mm艾条（精装套盒）
公司名称	刘广宁（个体经营）
价格	18.00/套
规格参数	品牌:奇美特 型号:小号面部温灸棒 产地:广州
公司地址	中国 广东 广州市 大沙北路泰景中街4号
联系电话	86 020 82495598 13828404747

产品详情

品牌	奇美特	型号	小号面部温灸棒
产地	广州	箱装数量	100套
贸易属性	内贸		

小号纯铜温灸棒 用0.4艾条 主要用于眼睛和脸部

本款包括：小号纯铜温灸面部美容棒，温灸艾条一盒10只 温灸用精油一瓶 10ml 精美包装彩盒

操作方法：1.将温灸条一端点燃，将燃端推入温灸器中2.轻压温灸器弹力，使温灸条到顶端，以水平或倒置动作调整温灸与两端的距离，可使用温度。3.以手掌试温高低，确定温度适中，即可开始使用4.每次灸5——15分钟，使穴点经络皮肤灼热，红润。 注意事项：1.温灸条点燃后，不可悬空太久，以免接触皮肤时，因温度太高而烫伤，如悬空太久时，可先以手掌或酒精棉球将温灸器的温度搓低后，继续使用，2.每隔二分钟，应当轻敲温灸器，使绒灰除去并再次调整温灸条的位置，以保持燃烧使用。3.温灸条每使用2---3次后，温灸器下端附件会产生许多的油垢，应该这部份浸泡在酒精中，以毛刷清洗，保持运作顺利，不可用水清洗4.熄灭时，只要将下端弹簧部份按下，同时竖起温灸条，使温灸条滑入管内，10秒钟即可熄灭5.温灸条若未燃尽，留置管内，待下次取出管外点燃，继续使用，但温灸条燃到末端，会掉离内管夹，此时请不要再使用，应小心将内管取出，清除多余的灸条。6.温灸时间早晚各二次，适度为宜，病重不在此限，温灸完毕，喝一杯温水，以免有燥热感觉

订购热线：13828404747

联系qq：1 6 4 6 4 3 9 6 7

