

艾医循经仪|艾医循经仪原理|艾医循经仪的功效作用

产品名称	艾医循经仪 艾医循经仪原理 艾医循经仪的功效作用
公司名称	广州艾颜佳美容美发设备有限公司
价格	5100.00/台
规格参数	品牌:艾颜佳 型号:AYJ-MT01 产地:广州
公司地址	广州市白云区空港大道嘉大广场北附楼7楼艾颜佳(嘉禾望岗地铁A出口附近)
联系电话	020-62912226 18819361859

产品详情

一、艾医循经仪作用原理

艾医循经仪融合了发热和真空负压为核心技术的高科技纤体美容技术。广州艾颜佳艾医循经仪可以深层直达脂肪体，具有靶向定位射频输出的卓越性，使脂肪细胞组织在快速活跃的状态下，产生细胞体的热能摩擦热，使局部温度升高，通过汗腺，肝肠循环及淋巴将体内的多余脂肪及毒素排出体外，以达到溶解脂肪、养生理疗，远离亚健康功效。

二、艾医循经仪核心技术

a.强声磁力波对液体产生一种内爆效应，在压缩周期内对液体分子产生正压效应，使脂肪被迫运动，迫使脂肪溶解。

B.梯级负压：利用真空负压吸力，对身体进行吸、按和拉，使肌肉产生被动运动，从而达到纤体的功效。

三、艾医循经仪产品功效

1.通过仪器能量电极所产生的生物波刺激身体相应的穴位，利用不同的频率和脉冲，对脂肪体进行有效的刺激，让身体运动起来，从而再次消耗热量和脂肪，以达到塑身美体的功效。

2.通过其温热机械刺激以及负压吸拔身体穴位，不仅能够开滕理、散风寒，而且还能调整脏腑经络的作用，鼓舞人体正气，也有助于体内邪气的排出。

3.负压吸附疗法通过结经络、穴位局部产生负压吸引作用使体表穴位产生充血、瘀血等变化，穴位通过以经络与内在的脏腑相连。

四、艾医循经仪的理疗方式

1.温热震动理疗

使脂肪细胞组织在快速活跃的状态下，产生细胞体的热能摩擦热，使局部温度升高，通过汗腺，肛肠循环及淋巴将体内的多余脂肪及毒素排出体外。

2.温热脊椎理疗

通过发热震动，当仪器震动摩擦头放置理疗位置，上下前后按压操作.操作时间为10-20分钟，（目的利用摩擦提拉，促进刺激脊椎血液循环，疏通脊椎经络，可使腰部发麻，背部脊椎酸痛现象得到明显缓解效果）。

3.温热负压理疗

负压纤体头针对肥胖位置进行移脂减肥，当捏脂塑形头吸起脂肪后，向淋巴结处引流:，操作时间为10-20分钟“（目的利用负压交叉感电流，促进击素废物的脂肪的挣除，刺激该处可引起有关肌肉收缩，可使肌肉强化，改善肌肉松弛及肥胖等现象）。

广州艾颜佳美容美发设备有限公司是一家集研发、生产及销售的美容仪器设备公司。艾颜佳是生产高品质美容仪器的厂家，主要产品包括发热大师、DPLE净肤光能仪、面部检测仪、智能刷脸仪、热拉提、热玛吉、极立瘦、纯氧抗衰仪、水氧仪太空人、大气泡、小气泡、胸部护理仪、HPT智能养生仪、内在亚健康调理、生命密码仪、调Q激光、皮秒激光、808脱毛仪、OPT、IPL光子、红蓝光等产品。