

# 魔光脸谱仪原理及优势，一款锁住青春的活肤仪！

产品名称	魔光脸谱仪原理及优势，一款锁住青春的活肤仪！
公司名称	广州艾颜佳美容美发设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:艾颜佳 型号:AYJ-Y87A 产地:广州
公司地址	广州市白云区空港大道嘉大广场北附楼7楼艾颜佳(嘉禾望岗地铁A出口附近)
联系电话	020-62912226 18819361859

## 产品详情

### 一、魔光脸谱仪原理

魔光脸谱仪融合韩国、意大利、欧美等科学技术，由微气泡焕肤技术、SAP水疗、高压喷枪、细胞替换、无痕慧眼、循环射频六大技术组合而成的一款让您时光倒流以及锁住青春的活肤仪，也是一款好的美容仪器，利用全智能程序控制的真空负压模式，通过产品和设备的结合，在短时间内深层清洁表皮和毛孔内的脱落角质、粉刺、黑头及其他污垢。艾颜佳的魔光脸谱仪同时提升了产品的营养成分深层吸收，促使毛孔收细，平滑肌肤，增加皮肤的保湿性，使肌肤呈现水嫩净白，水润饱满的质感，而循环射频技术可同时嫩白肌肤、深度嫩肤、提拉面颈部松垂组织、消融脂肪组织、瘦脸塑形。

### 二、魔光脸谱仪五大产品优势

#### 1、小气泡

采用水置换及低压原理，通过对内环境水分子进行处理，快速解决呼吸不通畅的肌肤，疏通淋巴、祛除表皮污垢、祛除表皮代谢的角质以及内环境水被各种色素污染，让你的肌肤达到清爽通透，水嫩新生的感觉。

#### 2、冰封头

令血管收缩，强化蛋白纤维组织，收细毛孔，镇静肌肤，锁紧营养成分。适用于衰老性皮肤，易生皱纹皮肤，水肿皮肤等症皮肤的护理（改善红血丝、皱纹、痘痘）。表皮致冷，安全舒适，激活肌肤年轻态，改善肌肤衰老症状。

#### 3、喷头

配合活性浓缩成份的精华液做按摩皮肤清洁美白保湿，盖上各种瘙痒症、敏感皮肤、湿疹、暗疮皮肤、日光症等。

#### 4、RF射频头

循环射频技术通过调整体内细胞自身磁场恢复其自身原有功能，限制脂肪细胞增大的原理，六极射频技术每秒0.8MHz,穿透力在3-8mm之间，直接作用于肌肤底层，协助细胞制造胶原蛋白，重整肌肤纤维组织结构，加快细胞新陈代谢，延缓细胞衰老,使肌肤重新变得紧致光滑。

#### 5、面罩红光作用

波长为630nm的红光具有纯度高、光源强、能量密度均匀的特点。红光能让细胞的活性提高，促进细胞的新陈代谢，使皮肤大量分泌胶原蛋白与纤维组织来自身填充，加速血液循环，增加肌肤弹性，改善皮肤萎黄、暗哑的状况，激活肌肤年轻态的功效，有着传统护肤无法达到的效果。

#### 魔光脸谱仪各种颜色光的作用

蓝光：波长为415nm的蓝光具有快速抑制炎症的功效，在座疮的形成过程中，主要是丙酸杆菌在作怪，而蓝光可以在对皮肤组织毫无损伤的情况下，破坏这种细菌，更大限度减少座疮的形成，并且在很短时间内使炎症期的座疮明显减少至痊愈。

黄光：给皮肤细胞补充能量，促进腺体作用，辅助消化，增强免疫能力。

紫光：是红光和蓝光的双频光，它结合了两种光疗的功效，尤其在改善座疮和祛痘印痕方面有着良好的效果和修复作用。

绿光：有中和、平衡及安定之用，舒缓安定之用，舒缓精神紧张，有效疏通淋巴及排水肿。

橙光：能循序渐进的增强细胞能量，对新陈代谢有很好的刺激作用。

### 三、魔光脸谱仪操作步骤

第一步：选用面部卸妆液将眼部和面部的妆卸掉；

第二步：选用洁面乳将面部的惨妆、油脂、灰尘清洗干净；

第三步：面板界面选择气泡笔，使用水磨笔深层清洁吸黑头、粉刺、补水补养。根据客人皮肤类型选择磨砂头火平滑头，其中，磨砂头用于正常皮肤客人可以祛角质、死皮、嫩肤；平滑头用于皮肤比较敏感的客人，比如红血丝皮肤。然后以面部提升手法进行操作；

第四步：面板界面选择喷枪，配合活性浓缩成份的精华液做按摩皮肤清洁保湿滋润；

第五步：面板界面选择RF射频（I），使用RF射频紧致提升，激活肌肤年轻态。使用前先涂抹液剂火膏体产品于客人面部，操作过程中能量根据客人需求由低至高逐步调节（能量参数1-15档可调），然后以面部提升手法进行操作即可（PS：请勿直接以高能量作用于客人面部）；

第六步：面板界面选择冰封头启动该功能，用于帮助皮肤吸收各种营养成分；

第七步：面板界面选择面罩光源，根据情况使用不同的光来完成护理；

第八步：返回仪器初始界面，关掉电源，用生理盐水清洗各配件并擦拭干净（PS：不能使用酒精清理）

#### 四、魔光脸谱仪其他注意事项

- 1、请在切断电源的情况下，用洁净柔软的湿毛巾沾少呈清洁剂，擦净机壳外部各处，然后再用干毛巾擦干即可，每月1-2次。
- 2、湿化瓶上盖必须拧紧，否则将因此处漏气而减少氧气量。每天要刷洗一次，以防止水中细菌。
- 3、将注氧仪放在远离火种的地方。
- 4、注氧仪及其他接触到氧气的配件必须是没有油脂的，避免引致爆炸。
- 5、不可在密封的环境内释放氧气，以免发生火灾。
- 6、机器启动严禁吸烟或制造任何火种，千万不要把氧气喷向易燃液体，这样会引起火警。
- 7、本仪器每次使用的时间不得超过两个小时。

广州艾颜佳美容美发设备有限公司是一家集研发、生产及销售的美容仪器设备公司。艾颜佳是生产高品质美容仪器的厂家，主要产品包括发热大师、DPLE净肤光能仪、面部检测仪、智能刷脸仪、热拉提、热玛吉、极立瘦、纯氧抗衰仪、水氧仪太空人、大气泡、小气泡、胸部护理仪、HPT智能养生仪、内在亚健康调理、生命密码仪、调Q激光、皮秒激光、808脱毛仪、OPT、IPL光子、红蓝光等产品