

医疗设备QI3536细胞分类计数器可计数58种细胞生产厂家

产品名称	医疗设备QI3536细胞分类计数器可计数58种细胞生产厂家
公司名称	杭州聚莱仪器有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	品牌:聚同 型号:QI3536 产地:浙江杭州
公司地址	杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦3幢二单元1127室
联系电话	13115717850

产品详情

湖北医疗设备QI3536细胞分类计数器可计数58种细胞生产厂家

JTONE品牌细胞分类计数器是在听取了专家的意见后，根据多家医院医务人员对细胞分类计数的要求研制开发的，是目前功能较完整的细胞分类计数器。

计数器设置了58种细胞。

粒系：原粒、早粒、中粒、晚粒、杆状、分叶(分嗜酸、嗜碱、中性三类18个细胞键)

红系：原红、早红、中红、晚红、其它1、原巨、早巨、中巨、晚巨、其它2

巨系：原始、幼稚、颗粒、产板、小原、小幼、小巨、裸核、分裂、其它3

浆系：原浆、幼浆、浆

单系：原单、幼单、单核

淋系：原淋、幼淋、淋巴、异淋

其它细胞：脂肪、组酸、组碱、网状、恶组、吞噬、成纤、内皮、成骨、破骨

组化：-、+、++、+++、++++

使用方法1．把仪器电源插头插入AC220V电源插座，打开电源开关，仪器八组数据和总数T/N都显示“0”，若有显示不为“0”，则按一下“RESET”键，使各组显示数据复零。2．仪器把常用的“嗜中性、

淋巴、单核、嗜酸性、嗜碱性”五种白血球计数对应“1、2、3、4、5”组计数器上，若进行上述五种白血球计数，可直接按动相应的计数键进行计数。3. 其他血球细胞的分类计数，用户可在“6、7、8”三组计数器上进行定义，按动相应的计数键进行计数。4. 八只计数键中按动其中任一只键，都会听到蜂鸣器“嘟”一声响，表示计数有效，相应的计数器加1，而总数T/N同时加1，若一次没有听到蜂鸣器“嘟”一声响，表示计数无效，需重新计数。5. 当计数的总数达到100，则本次分类计数已计满，可听到“嘟”的一声长响。请记住各组数据，按一下“RESET”键，八组显示屏全部复零，可继续计数。6. 如果计数的总数没有计满100，而需结束本次测量时，可按下“%”键，可“嘟”一声后，电脑自动地将各组数据换算成百分比值显示在对应的显示屏上，总数不变。7. 每次测量结束时，按一下“RESET”键，八组数据和总数都为“0”，仪器恢复到初始状态，可进行下一次测量。

保养和维护

1. 仪器水平放置，远离强电磁场的干扰，电源电压应在规定的范围内。
2. 按计数键时，手指应按在键的中部，用力要适当，过轻因接触不良而不计数，过重易损坏键。
3. 仪器使用结束，应拔下电源插头，盖上防尘盖，并保持干燥。

装箱清单

1. 血球分类计数器主机1台
2. 使用说明书1份
3. 0.3A保险丝1只
- 合格证1份